

医療器具 54 医療用捲綿子


一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

フロックスワブ・チューブタイプ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
フロックスワブ・チューブタイプは、プラスチック製軸の先端にナイロン製の植毛構造による綿球を付けた検体採取用のスワブと輸送用チューブからなる。

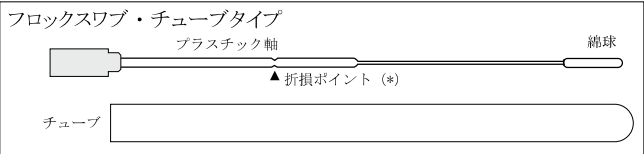

*: 折損ポイントの無いタイプもあります

【使用目的、効能又は効果】
細菌検査等のための試料を採取することを目的とした器具である。

【操作方法又は使用方法等】

1 輸送用チューブのキャップをひねり、開栓してください。

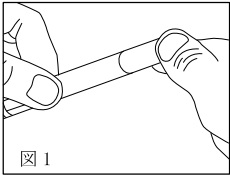


図 1

2 綿棒付きスワブを取り出して検体を採取します。

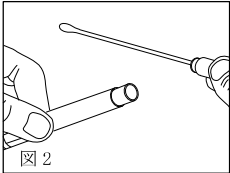


図 2

3 検体を採取したスワブを輸送用チューブに挿入し、スワブ上部のキャップでしっかりと閉めます。

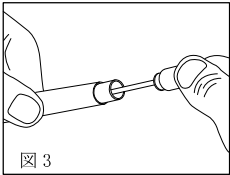


図 3

4 輸送用チューブの外面の記入欄に検体の情報を書き入れます。

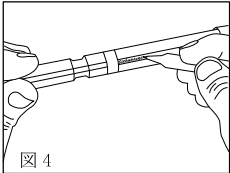


図 4

【使用上の注意】

1. 本品の使用は1回限り。再使用は禁止する。
2. 開封後は速やかに使用する。
3. スワブによる検体の採取は、十分習熟した人の指示のもとに実施すること。
4. 本品は滅菌済みなので、包装に破れやピンホールなどがあつたり、製品に破損や折れ曲がり等があった場合には使用しない。
5. 検体の輸送には適正な容器を使用し、二次感染に注意すること。
6. 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、注意して取り扱うこと。
7. 患者から検体を直接採取するときは、力を入れすぎてスワブの軸を折つたり、採取する粘膜などの部位を傷つけないように、無理な力をかけないこと。

8. 使用期限の過ぎたものは使用しない。
9. 軸部分は弾力性があるので、使用するには試料が跳ねないように注意すること。
10. 使用後は速やかに滅菌処理してから廃棄すること。廃棄の際は、医療廃棄物等に関する規定などの各種規制に従い、各施設の責任において処理すること。

【包装】

商品コード	キャップ色	包装単位	折損ポイント位置 (綿球先端から)	(▼は折損ポイント)
519C	ピンク	100 本	100mm	
552C	赤	100 本	80mm	
520C	白	100 本	30mm	
518C	緑	100 本	100mm	
551C	緑	100 本	80mm	
553C	白	100 本	100mm	
516C	白	100 本	100mm	
560C	オレンジ	100 本	80mm	
534C	青	100 本	N/A	
52980C	白	100 本	80mm	
5U085S	赤	100 本	N/A	
528C	青	100 本	N/A	

* すべてチューブ入りです。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： 有限会社テクノアメニティ
〒621-0821 京都府亀岡市篠町柏原町頭 56
TEL：0771-58-0023

外国製造業者： コパン イタリア エス ピー エイ
(COPAN Italia S.p.A.)

国名：イタリア