

医療器具 54 医療用捲綿子

一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

4N6 ジェネティクス


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
4N6 ジェネティクスは、プラスチック製軸の先端にナイロン製の植毛構造による綿球がついた検体採取用のスワブである。





材質 綿球 : ナイロン
 軸 : プラスチック
 チューブ : ポリプロピレン
 キャップ : 高密度ポリエチレン
 キュベット : プラスチック

外観図

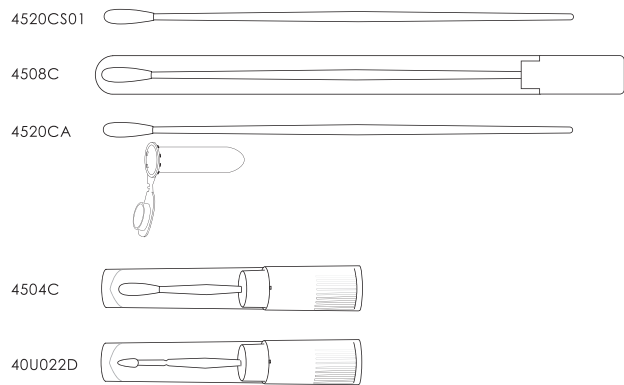

【使用目的】
細菌検査等のための試料を採取することを目的とした器具である。

【操作方法又は使用方法等】

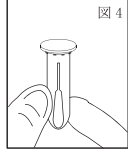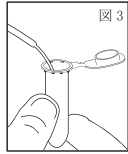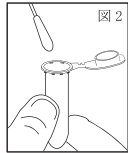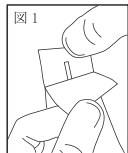

1. パッケージを開封し、スワブ等を取りだします。その際、綿球やチューブの蓋など検体が接触する部分に手を触れないように注意します。
2. 検体を採取し、綿球部分をチューブに挿入します。
3. スワブ軸に刻まれたブレイクポイント（折損点）が支点となるようにしてスワブ軸を折ります。検体が飛散しないように注意します。
4. チューブにキャップして、その後の作業に移ります。

- 【使用上の注意】
1. 本品の使用は1回限り。再使用は禁止する。
 2. 開封後は速やかに使用する。
 3. スワブによる検体の採取は、十分習熟した人の指示のもとに実施すること。
 4. 本品は滅菌済みなので、包装に破れやピンホールなどがあつたり、製品に破損や折れ曲がり等があつた場合には使用しない。
 5. 検体の輸送には適正な容器を使用し、二次感染に注意すること。
 6. 全ての検体は病原菌に汚染されているものとして、保護具を着用するなどして注意して取り扱うこと。
 7. 患者から検体を直接採取するときは、力を入れすぎてスワブの軸を折ったり、採取する粘膜などの部位を傷つけないように、過度な力をかけないこと。
 8. 使用期限の過ぎたものは使用しない。
 9. 軸部分は弾力性があるので、使用する際には試料が飛散しないよう注意すること。
 10. 使用後は速やかに滅菌処理してから廃棄すること。廃棄の際は、医療廃棄物等に関する規定などの各種規制に従い、各施設の責任において処理すること。

- 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
1. 貯蔵・保管方法：室温下（2℃～30℃）で水濡れに注意し、直射日光や高温多湿を避けて保管する。
 2. 使用期限：外箱、パウチに記載。使用期限の過ぎたものは使用しないこと。

【包装】

4N6 ジェネティクス

商品コード	内容	包装単位
4520CS01	スワブ	100 本／箱
4508C	スワブ＋輸送用チューブ	100 セット／箱
4520CA	スワブ＋キュベット	100 セット／箱
4504C	スワブ＋輸送用チューブ	100 セット／箱
40U022D	スワブ＋輸送用チューブ	100 セット／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者： 有限会社テクノアメニティ
〒621-0821 京都府亀岡市篠町柏原町頭 56
TEL：0771-58-0023

外国製造業者： コパン イタリア エス ピー エイ
（COPAN Italia S.p.A.）
国名：イタリア