

医療器具 54 医療用拭綿子
一般医療機器 医科用拭綿子 10172000

クリニスワブ DS


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

クリニスワブ DS は、アプリケーター軸の先端に綿球がついた検体採取用のスワブである。ブリストアパックで包装され滅菌処理されている。タイプによっては検体を採取したスワブを入れる輸送用チューブとセットになっているものもある。

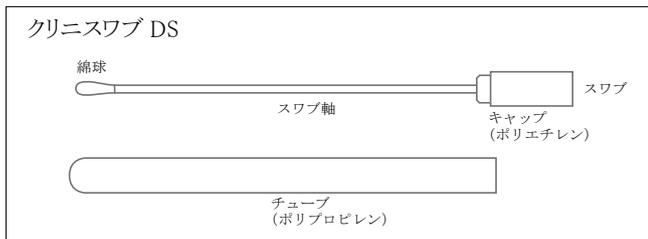


【使用目的】


検査のための試料を採取することを目的とした器具をいう。

【使用方法等】


(輸送用チューブが同梱されているタイプ)

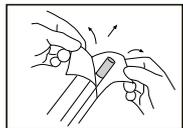


1 “PEEL HERE” と書かれてい部分をつまんでブリストアパックを開封し、採取用スワブを取り出します。

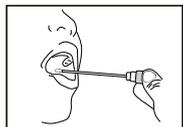

2 スワブに過度の負荷がかからないようにして、検体を採取します。

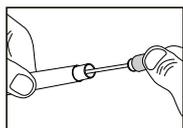

3 検体を採取したスワブを輸送用チューブに挿入し、スワブ上部のキャップをしっかりと閉めます。

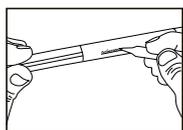

4 輸送用チューブの外ラベルの記入欄に検体の情報を書き入れます。直ちに検査室などへ移送します。

【使用上の注意】

* (重要な基本的注意)

1. 包装が破損しているものは滅菌状態が保たれていないので、使用しないこと。
2. 検体を採取する前に軸部分を折り曲げたり、湾曲させて使用しないこと。
3. 本製品の使用者は十分に訓練を受け、資格を有する人に限定すること。
4. 患者から検体を採取するときは、力を入れすぎたり、強く押し たりしてスワブの軸を折らないよう注意する。
5. 便検体については、排便された便より採取すること。直腸からの検体直接採取は、採取中にスワブが折れる危険性があるため行わないこと。
6. 凍結や加熱をしない。

7. スワブの軸を切る必要があるときは滅菌したハサミを使って、安全に注意しながら汚染しないように行うこと。
8. すべての過程においてスタンダードプリコーション(標準予防策)を尊重し、適切な防護具(保護服、マスク、ゴーグル、手袋等)を着用して作業すること。また、各検査室のガイドラインを遵守すること。
9. 使用後のチューブとスワブは、検査室の感染性廃棄物の処理規定に厳格に従って処分すること。

【保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法：室温下の温度で水濡れに注意し、直射日光や高温多湿を避けて保管する。凍結保存不可。
2. 使用期限：製造後60カ月。外箱、ブリストアパックに記載。使用期限の過ぎたものは使用しないこと。

【包装】

* クリニスワブ DS

商品コード	キャップ色	スワブ軸	綿球
#2190SGCS	黒	プラスチック	ポリウレタン
#2160SGCS	白	プラスチック	レーヨン
#2170SGCS	オレンジ	アルミニウム	レーヨン
#6200SGCS		プラスチック	ポリウレタン
#6300SGCS		プラスチック	ポリウレタン
#5100SGCS		木	コットン
#6100SGCS		プラスチック	レーヨン
#7100SGCS		アルミニウム	レーヨン

包装単位：100本/箱 (▼は折損ポイント)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 有限会社テクノアメニティ
〒621-0821 京都府亀岡市篠町柏原町頭 56
TEL：0771-58-0023

外国製造業者： アプタカ エスピーエー
(APTACA S.p.A.)

国名：イタリア共和国