

クリニスワブ DS

再使用禁止


【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
クリニスワブ DS は、アプリケーター軸の先端に綿球がついた検体採取用のスワブである。プリスターパックで包装され滅菌処理されている。タイプによっては検体を採取したスワブを入れる輸送用チューブとセットになっているものもある。




【使用目的、効能又は効果】
検査のための試料を採取することを目的とした器具をいう。


【操作方法又は使用方法等】
(輸送用チューブが同梱されているタイプ)

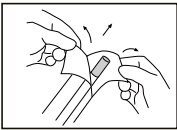


1 “PEEL HERE” と書かれてい部分をつまんでプリスターパックを開封し、採取用スワブを取り出します。

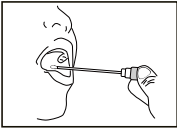

2 スワブに過度の負荷がかからないようにして、検体を採取します。

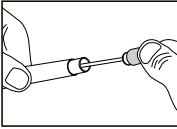

3 検体を採取したスワブを輸送用チューブに挿入し、スワブ上部のキャップをしっかりと閉めます。

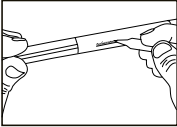

4 輸送用チューブの外ラベルの記入欄に検体の情報を書き入れます。直ちに検査室などへ移送します。

【使用上の注意】

- 包装が破損しているものは滅菌状態が保たれていないので、使用しないこと。
- 検体を採取する前に軸部分を折り曲げたり、湾曲させて使用しないこと。
- 本製品の使用者は十分に訓練を受け、資格を有する人に限定すること。
- 患者から検体を採取するときは、力を入れすぎたり、強く押し たりしてスワブの軸を折らないよう注意する。
- 便検体については、排便された便より採取すること。直腸からの検体直接採取は、採取中にスワブが折れる危険性があるため行わないこと。
- 凍結や加熱をしない。
- スワブの軸を切る必要があるときは滅菌したハサミを使って、安全に注意しながら汚染しないように行うこと。

8. すべての過程においてスタンダードプリコーション（標準予防策）を尊重し、適切な防護具（保護服、マスク、ゴーグル、手袋等）を着用して作業すること。また、各検査室のガイドラインを遵守すること。

9. 使用後のチューブとスワブは、検査室の感染性廃棄物の処理規定に厳格に従って処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 貯蔵・保管方法： 室温下の温度で水濡れに注意し、直射日光や高温多湿を避けて保管する。凍結保存不可。
- 使用期限： 製造後 60 カ月。外箱、プリスターパックに記載。使用期限の過ぎたものは使用しないこと。

【包装】		クリニスワブ DS	
商品コード	キャップ色	スワブ軸	綿球
#2190SGCS	黒	プラスチック	ポリウレタン
#2160SGCS	白	プラスチック	レーヨン
#2170SGCS	オレンジ	アルミニウム	レーヨン
#6300SGCS		プラスチック	ポリウレタン
#5100SGCS		木	コットン
#6100SGCS		プラスチック	レーヨン
#7100SGCS		アルミニウム	レーヨン
フロックスワブ			
#2195SG	青	プラスチック軸 スタンダードチップ チューブ入個別包装	
#2196SG	青	プラスチック軸 ファインチップ チューブ入個別包装	
#6510SG-CS		プラスチック軸 スタンダードチップ パウチ袋入個別包装	
#6520SG-CS		プラスチック軸 スタンダードチップ パウチ袋入個別包装	
#6535SG-CS		プラスチック軸 スタンダードチップ+フラインチップ パウチ袋入個別包装	
包装単位： 100 本 / 箱 (▼は折損ポイント チップ先端から 80mm)			

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者： 有限会社テクノアメニティ
〒621-0821 京都府亀岡市篠町柏原町頭 56
TEL：0771-58-0023

外国製造業者： アプタカ エスピーエー
(APTACA S.p.A.)
国名：イタリア