


取扱説明書を必ず参照する

承認・届出等 販売名 **アトミックヒータープレート**
形状・構造及び原理等

1. 製品外観図



温度コントローラの機能とボタンスイッチ

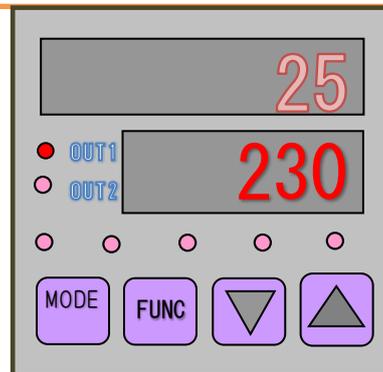

現在温度
OUT1
通電中点灯(出力)
設定温度
▽ 設定値 DOWN
▲ 設定値 UP

MODE 設定ボタン(長押し2秒)プログラム選択
FUNC 設定値入力 桁移動

プレート状のヒーターと温度コントローラから構成されています。

使用目的、効能又は効果

歯科技工に於いて、油圧プレス又はエアプレスのテーブル上にヒータープレートを置き、加圧しながら床用レゾンの加熱重合を行う事目的とした装置。

操作方法又は使用方法等

詳細な設置方法や使用方法については、付属の取扱説明書等を必ず必読してください。

設置接続及び使用方法

- 1) エアプレス又は油圧プレスのテーブル上にヒータープレート(セッティング参考図)をおきます。
- 2) メインスイッチをONにして、ヒータープレートの上限温度をセットします。(セット方法はスイッチの機能を参照)
- 3) 分離材を塗布してレゾン充填前のワジコの上にレゾンを詰めた填入シリンダーを置き、加圧して填入します。
- 4) メインスイッチをONにして、任意の時間、ワジコを加熱して、レゾンの重合を促進します。
- 5) メインスイッチをOFFにして、任意の時間経過後、取り出す又は、水中での加圧加温重合装置で重合します。

使用上の注意

詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

- 1) 本製品は、エアプレス、油圧プレス等のテーブルの中心に置いて使用して下さい。
- 2) 使用するプレスの最高加圧は2tonを超えて使用しないで下さい。
破損、変形の原因となります。
- 3) 電源電圧はAC100Vに接続して下さい。
- 4) 上限温度を150℃に設定しています。(絶対に変更しない事)

貯蔵・保管方法及び使用期間等

1) 貯蔵・保管方法

- (1) 水のかからない場所に保管する事。
- (2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、等を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管する事
- (3) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等に対する安定状態に注意する事。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない事。

2) 耐用期間(製造日から正規の保守点検を行った場合に限り7年間とする。)

保守・点検に係る事項


詳細については、取扱説明書の保守点検の項をご使用前に必ずお読みください。

- 1) 部品の劣化パーツの破損等は必ず定期点検を行う事。

器械取扱についての基本的な注意

- 1) 引火性の物や可燃性の物を近くに置かない事。
- 2) 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理な力を加えない事。
- 3) コンセントは、緩んでいたり、埃のたまった状態で使用しない事。
- 4) 使用後は電源スイッチをOFFにする事、又、長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く事。
- 5) 煙が出たり、異臭、異音がする場合は、使用をやめて、販売店に連絡する事。
- 6) 異常に高温になった場合は、コンセントを抜いて、販売店に連絡する事。

参考図

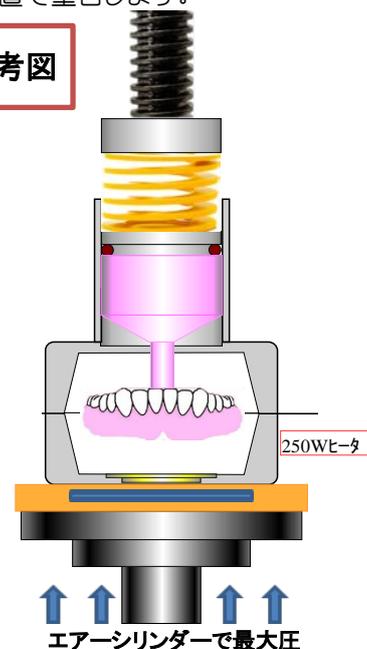

裏面もお読みください。

包装 1 梱包／1 セット

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等

氏名又は名称 有限会社 アトミック (第三種医療機器製造販売業)

住所等 〒534-0023

電話番号

大阪市都島区都島南通 1 丁目 14-4 TEL 06-6330-0428 FAX 06-6330-1655