

類別：機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 一般の名称：温熱用パック（JMDNコード：37240010）

イギリス 温活アイマスク

【禁忌・禁止】

- ・アイマスクは過熱すると火傷を引き起こす可能性があります。電子レンジから取り出した後、アイマスクをよく振って熱を均等に分散させ、ホットスポットを防ぐようにして下さい。
- ・皮膚との長時間の直接接触は避けて下さい。
- ・清潔で乾燥した環境で保管して下さい。
- ・子供の手の届かないところに置いて下さい。

【形状、構造及び原理】

- ・本品はアイマスクと加熱用ビーズが入った内袋（アイマスクに内蔵）から構成されています。
- ・アイマスクの素材：ポリエステル、ポリジン塗布、シリコンビーズ、ポリエステル+綿、天然ラテックス
- ・加熱したアイマスクを患部に当て温熱治療を行う。まぶたを外部から加熱することにより、さまざまな眼の状態や症状を緩和するのに役立ちます。まぶたを温めると腺が刺激され、目の緊張や刺激が緩和されることがあります。

【使用目的又は効果】

- ・加熱媒体の入ったパックを加熱装置で加熱したものを患部に当て、消炎鎮痛処置（温熱治療）を行うパックをいう。冷却装置で冷却することにより、冷熱を供給する冷却パックを兼ねるものもある。本品は再使用可能である。

【使用方法】

- ・電子レンジ内テーブルにアイマスクを平らに置いてください。
- ・電子レンジ加熱要領は以下の通りです。
定格：0～850W、最大時間：30秒
定格：851～1000W、最大時間：15秒
- ・アイマスクを目に装着する前に、必ず手首の内側にアイマスクを当てて、温度を確認してください。熱すぎると感じた場合は1～2分待つて冷ましてください。再度、温度を確認してから、閉じた目に装着してください。ストラップを頭に巻き、快適さを調節してください。

【使用上の注意】

1. アイマスクは塗布されているポリジンによる抗臭抗菌加工技術が維持されるように、必ずぬるま湯で手洗いしてください。洗剤は使用しないでください。
2. 内袋（ビーズ）は濡らしたり、洗ったりしないでください。

【保管方法及び有効期間】

- ・多湿環境を避けて保管してください。
- ・1年間で1日1回365回以上加熱可能です。定期的に点検し、摩耗や破損が見られた場合は廃棄してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：USA-Direct, LLC
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号
電話：06-6948-8083

外国製造業者：The Body Doctor Ltd（英国）
住所：Unit 1, Park Mill Way, Clayton West
Huddersfield HD8 9XJ West Yorkshire. UK