

イギリス 温活アイマスク 子ども用サイズ

【禁忌・禁止】

- ・アイマスクは過熱すると火傷を引き起こす可能性があります。電子レンジから取り出した後、アイマスクをよく振って熱を均等に分散させ、ホットスポットを防ぐようにして下さい。
- ・皮膚との長時間の直接接触は避けて下さい。
- ・清潔で乾燥した環境で保管して下さい。

【形状、構造及び原理】

構成

本品はアイマスクと加熱用ビーズ（アイマスクに内蔵）から構成されています。

アイマスクの素材：ポリエステル、ポリジン塗布、シリコンビーズ、ポリエステル+綿、天然ラテックス

原理

加温したアイマスクを患部に当て温熱治療を行う。まぶたを外部から加熱することにより、さまざまな眼の状態や症状を緩和するのに役立ちます。まぶたを温めると腺が刺激され、目の緊張や刺激が緩和されることがあります。

【使用目的又は効果】

加熱媒体の入ったパックを加熱装置で加熱したものを患部に当て、消炎鎮痛処置（温熱治療）を行うパックをいう。冷却装置で冷却することにより、冷熱を供給する冷却パックを兼ねるものもある。本品は再使用可能である。

【使用方法】

電子レンジ対応の清潔な皿に平らに置きます。

電子レンジの加熱要領は以下の通りです。

- ・定格0～850W、最大時間20秒
- ・定格851～1000W、最大時間15秒

アイマスクを目に装着する前に、必ず手首の内側にアイマスクを当てて、温度を確認して下さい。熱すぎると感じた場合は1～2分待つて冷ましてください。再度、温度を確認してから、

閉じた目に7～10分間装着して下さい。ストラップを頭に巻き、快適さを調節して下さい。

【使用上の注意】

1. 使用に不安がある場合や症状が続く場合は医師に相談して下さい。
2. コンタクトレンズは使用前は必ず外して下さい。
3. 電子レンジの加熱操作は大人が行うようにして下さい。
4. 汚れた場合は湿らせた柔らかい布で軽く拭きとってください。水に浸したり、洗剤、漂白剤、柔軟剤の使用はできません。誤って濡らしてしまった場合は、乾燥機・アイロンは使用せず自然乾燥させてください。

【保管方法及び有効期間】

- ・多湿環境を避けて保管して下さい。
- ・製品は複数回再利用可能です。定期的に点検し、摩耗や破損が見られた場合は廃棄して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：USA-Direct, LLC
住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号
電話：06-6948-8083

外国製造業者：The Body Doctor Ltd（英国）
住所：Unit 1, Park Mill Way, Clayton West
Huddersfield HD8 9XJ West Yorkshire. UK