

2026年4月(第3版)

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。

医療機器届出番号：28B3X1004000011

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 JMDNコード 71105001

リライブシャツ コア

【禁忌・禁止】

- ・異常(かゆみ、かぶれなど)を感じた場合は、使用を中止すること。
- ・皮膚にかぶれ、湿疹、傷などの異常がある場合は使用しないこと。

【使用目的又は効果】

本製品は遠赤外線の血行促進効果により、次のような健康効能が期待できる。

【遠赤外線の血行促進作用】

- ・血行促進
- ・疲労回復
- ・筋肉のコリを緩和
- ・腰・肩などの筋肉のコリを改善
- ・筋肉の疲れを軽減

【使用方法】

- ・本品は再使用が可能です。
- ・本品に破損がない事を確認してください。
- ・衣類として着用してください。
- ・日常生活及び睡眠時のいずれかでも着用可能です。
- ・本品は肌着の上に重ねても、素肌の上に直接でもご着用いただけます。

【保管方法及び有効期間】

- ・直射日光、水濡れ、高温多湿な環境を避けて保管すること。
- ・しばらく使用しないときは、一度干してから、湿気のない場所で保管すること。

取扱い上の注意

本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上無理な力を加えたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合がありますので、ご注意ください。

耐用期間

1年

【形状・構造及び原理】

1.形状・構造

■ リライブシャツ コア



	c m					
SIZE	SS	S	M	L	LL	3L
着丈	66	68	70	72	74	76
肩幅	44	45	47	49	51	53
身巾	50	52	54.5	57	59.5	62
袖丈	19.5	20	21	22	23	24

2.原理

本品は繊維の原材料の生地全体に高純度セラミックを練りこみ、特殊な鉱石プリント加工を施すことで体熱等を伝導及び吸収し、一定程度の遠赤外線を放射し、遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のコリ等の症状改善を行うことを目的とした衣類形状の医療機器である。

3.原材料

(主なもの)

ポリエステル、セラミック、テラヘルツ(珪素)
リチアトルマリン

【使用上の注意】

- ・色落ちする恐れがありますので、他の物と一緒に洗わないでください。
- ・プリント部分はおみ洗いを避け、直接アイロンを当てないでください。
- ・タンブラー乾燥禁止。
- ・刺繍、プリント部分のおみ洗い、アイロン禁止。
- ・小さなお子様の手の届かない所に保管してください。頭にかぶると窒息のおそれがあります。
- ・持病のある方や妊婦の方でご不安な場合は、医師へ相談のうえご使用ください。
- ・着用中に身体や皮膚などに異常を感じた場合は、直ちに着用を中止し、医師の判断に従ってください。

【包装】

1袋1枚入り
チャック付密閉梱包袋

【製造販売業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社ユアージュ
〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目3番20号
電話：06-6435-9905

【販売元の氏名又は名称】

販売元：株式会社りらいぶ
〒981-3212 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘三丁目27番3号
オメガコートビル
電話：0570-037-827