

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ JMDN コード 16184000


プロフィーカップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は、再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

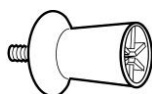

プロフィーカップ

名称	面の形状	組成
101 / リブ		シリコーン 樹脂
103 / シックスウェブ		シリコーン 樹脂
104 / スクエアリブ &ウェブ		シリコーン 樹脂
105 / リブ&ウェブ		シリコーン 樹脂
106 / ピドリブ		シリコーン 樹脂

【使用目的又は効果】

本品は、歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するため
に用いるゴム製の器具で、歯科用ハンドピースに取り
付けて回転させて研磨材を適用する。

【使用方法等】

- ① 研磨部位に応じてプロフィーカップを選択する。
- ② プロフィーカップをスクリュータイプのプロフィー
コントラハンドピースに取り付ける。
- ③ プロフィーカップに十分な研磨用ペーストを付ける。
- ④ プロフィーカップを歯全体に軽く押し付けて研磨す
る。

※回転数は 800～1,200r. p. m. で使用すること。

【使用上の注意】＊

- ① 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをさせるお
それがあるので、使用回転数を遵守すること。
- ② 本品はシャンク（スクリュー）部を確実に最後まで挿
入し、半チャック状態でないことを確認すること。
- ③ あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れないこ
とを確認すること。
- ④ 使用に際しては、プロフィーカップを歯面にあててか
ら回転させること。口腔外で回転させるとプロフィー
ペーストが飛び散ることがある。
- ⑤ 使用時に無理な力を加えないこと。無理な力を加える
と負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つけるおそれ
がある。
- ⑥ 本品はスクリュー式なので、モーターを逆（左）回転さ
せると外れてしまう。使用に際しては、必ず正（右）
回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：コーディカ メディカル **
Cordica Medical, Inc. **
（国名：アメリカ合衆国）