

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯磨カップ JMDNコード 16184000


## プロフィールポイント

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

本品は、再使用禁止。

#### 【形状、構造及び原理等】

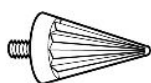

#### プロフィールポイント

名称	面の形状	組成
108S/ソフト/グリーン		合成ゴム
108H/ハード/イエロー		合成ゴム

#### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科予防(清掃)時に研磨材を適用するために用いるゴム製の器具で、歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を適用する。

#### 【使用方法等】

- ① 研磨部位に応じてプロフィールポイントを選択する。
- ② プロフィールポイントをスクリュータイプのプロフィールコントラハンドピースに取り付ける。
- ③ プロフィールポイントに十分な研磨用ペーストを付ける。
- ④ プロフィールポイントを歯全体に軽く押し付けて研磨する。

※回転数は800~1,200r.p.m.で使用すること。

#### 【使用上の注意】\*

- ① 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをさせるおそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ② 本品はシャンク(スクリュー)部を確実に最後まで挿入し、半チャック状態でないことを確認すること。
- ③ あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- ④ 使用に際しては、プロフィールポイントを歯面にあててから、回転させること。口腔外で回転させるとプロフィールペーストが飛び散ることがある。
- ⑤ 使用時に無理な力を加えないこと。無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つけるおそれがある。
- ⑥ 本品はスクリュー式なので、モーターを逆(左)回転させると外れてしまう。使用に際しては、必ず正(右)回転で使用し、逆(左)回転はしないこと。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:  株式会社 **ヨナガ**  
住 所: 〒110-8507  
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電話番号: 03-3845-2931

FAX番号: 03-3841-8204

製造元: Allpro, a division of Team  
Technologies, Inc.\*  
(国名: アメリカ合衆国)