

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ JMDN コード 16184000


プロフィーポイント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は、再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

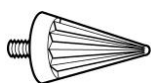

プロフィーポイント

名称	面の形状	組成
108S/ソフト/グリーン		合成ゴム
108H/ハード/イエロー		合成ゴム

【使用目的又は効果】

本品は、歯科予防（清掃）時に研磨材を適用するために用いるゴム製の器具で、歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を適用する。

【使用方法等】

- ① 研磨部位に応じてプロフィーポイントを選択する。
- ② プロフィーポイントをスクリュータイプのプロフィーコントラハンドピースに取り付ける。
- ③ プロフィーポイントに十分な研磨用ペーストを付ける。
- ④ プロフィーポイントを歯全体に軽く押し付けて研磨する。

※回転数は 800～1,200r. p. m. で使用すること。

【使用上の注意】＊

- ① 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをさせるおそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ② 本品はシャンク（スクリュー）部を確実に最後まで挿入し、半チャック状態でないことを確認すること。
- ③ あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- ④ 使用に際しては、プロフィーポイントを歯面にあててから、回転させること。口腔外で回転させるとプロフィーペーストが飛び散ることがある。
- ⑤ 使用時に無理な力を加えないこと。無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つけるおそれがある。
- ⑥ 本品はスクリュー式なので、モーターを逆（左）回転させると外れてしまう。使用に際しては、必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：コーディカ メディカル **
Cordica Medical, Inc. **
(国名：アメリカ合衆国)