

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN コード 35768000

プロフィールブラシ

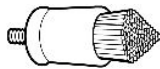
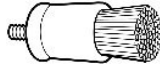
再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は、再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

プロフィールブラシ

名称	面の形状	組成
110 / テーパーブラシ		合成ゴム、 ナイロン等
114 / フラットブラシ		合成ゴム、 ナイロン等
211 / メタルベース		金属、 ナイロン等

【使用目的又は効果】

本品は、歯科衛生士及び歯科医師が歯の清掃と研磨に用いるブラシを備えた回転式歯科用器具で、歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を適用する。

【使用方法等】

- ① 研磨部位に応じてプロフィールブラシを選択する。
 - ② プロフィールブラシをスクリュータイプのプロフィールコントラハンドピースに取り付ける。
 - ③ プロフィールブラシに十分な研磨用ペーストを付ける。
 - ④ プロフィールブラシを歯全体に軽く押し付けて研磨する。
- ※回転数は 800～1,200r.p.m. で使用すること。

【使用上の注意】*

- ① 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをさせるおそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ② 本品のシャンク（スクリュー）部を確実に最後まで挿入し、半チャック状態でないことを確認すること。
- ③ あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- ④ 使用に際しては、プロフィールブラシを歯にあててから、回転させること。口腔外で回転させるとプロフィールペーストが飛び散ることがある。
- ⑤ 使用時に、無理な力を加えないこと。無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つけるおそれがある。
- ⑥ 本品はスクリュー式なので、モーターを逆（左）回転させると外れてしまう。使用に際しては、必ず正（右）回転で使用し、逆（左）回転はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨナガ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：Allpro, a division of Team
Technologies, Inc*
(国名：アメリカ合衆国)