

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用根管プラグ JMDN: 41876000

ブキャナン ハンドプラグー

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるので、
金属アレルギーの患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 型 番:

ハンドプラグー 0*、ハンドプラグー I、ハンドプラグー II

2. 仕様:

先端部の直径	サイズ 0	0.25mm と 0.75mm *
	サイズ I	0.40mm と 0.80mm *
	サイズ II	0.70mm と 1.30mm *

3. 原材料:

作業部: ステンレス鋼 (AISI440A)、
ニッケルチタン合金
ハンドル: アルミニウム (6061-T6)

【使用目的又は効果】

充填物を軸方向に充填する。

【使用上の注意】**

1. 使用注意

- ①使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- ②先端が鋭利になっているものがあるので、誤って手等を刺さないように注意すること。
- ③使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。*
- ④洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ⑤次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭用洗剤等は金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。
- ⑥薬液消毒を行なう時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属材料に影響を及ぼすことがあるので使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。特に長時間の侵漬は避けること。*
- ⑦消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。*
- ⑧すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により変色することがあるので注意すること。
- ⑨破損、曲がり等の原因になるので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ⑩長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】**

(保管方法)

- ①「もらい錆」を防ぐために、錆びのある器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。
- ②本品は、歯科の従事者以外触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】**

- ①汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ②超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また、汚れが落ち易いようにバスケット等に収納すること。
- ③洗浄剤が残留しないように十分すすぎを行うこと。
- ④洗浄後は、腐食を防ぐために必ず乾燥させること。
- ⑤使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、破損等の異常がないことを点検すること。
- ⑥点検後、高圧蒸気滅菌をすること。滅菌のための滅菌バック詰め等にあたっては、確実に滅菌できるように配慮すること。
- ⑦金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は器具の表面に傷をつけるので、汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:  株式会社 **ヨシタ**
住 所: 〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号: 03-3845-2931

F A X 番 号: 03-3841-8204

製 造 元: オームコーポレーション社
Ormco Corporation
(国名: アメリカ合衆国)