

リトラクター

【禁忌・禁止】*

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるため、金属アレルギーの患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 型番

- カー#1 45度リトラクター
- カー#2 90度リトラクター

2. 原材料

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

手術時に可視性及び到達性を向上させるため、軟組織を移動し、保護するために用いる。

【使用上の注意】**

1. 使用注意

- ①使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- ②口腔内での破損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ③使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。 **
- ④次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水(超酸性水)等の機能水、家庭用洗剤は、金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。
- ⑤洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ⑥薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。
- ⑦消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。 **
- ⑧すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により変色することがあるので注意すること。 **
- ⑨長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】**

(保管方法)

- ①「もらい錆」を防ぐために、錆びのある器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。
- ②本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】**

(洗浄、滅菌方法)

- ①汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- ②超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また汚れが落ち易いようにバスケット等に収納すること。
- ③洗浄剤が残留しないように十分すすぎを行うこと。
- ④金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面に傷をつけるので、汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- ⑤洗浄後は、腐食を防ぐために必ず乾燥させること。 **
- ⑥点検後、高圧蒸気滅菌をすること。滅菌のための滅菌パック詰め等にあたっては、確実に滅菌できるように配慮すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **Ormco**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電話番号：03-3845-2931
FAX番号：03-3841-8204

製造元：オームココレポレイション社 *
Ormco Corporation
(国名：アメリカ合衆国)