

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填器 JMDN:70680000

マイクロリペアー

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるの
で、金属アレルギーの患者には使用しないこと。＊

【形状・構造及び原理等】

1. 型番

マイクロリペアー ウェストパーフリペアー小
マイクロリペアー ウェストパーフリペアー大

2. 原材料

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科材料、歯科用医薬品等を歯牙に充填、塗布するた
めに使用する。

【使用上の注意】**

1. 使用注意

- ①使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- ②先端が鋭利になっているものがあるので、誤って手等
を刺さないように注意すること。
- ③破損、曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の
力を加えないこと。
- ④使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等
を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・消毒する
こと。**
- ⑤洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ⑥次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザ
ルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロル
ヘキシジン、超酸化水(超酸性水)等の機能水、家庭
用洗剤は、金属腐食を起こすおそれがあるので使用し
ないこと。
- ⑦薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使
用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属
素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤
の金属に対する腐食性に注意すること。特に長時間の
侵漬は避けること。**
- ⑧消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使
用すること。**
- ⑨すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により変色す
ることがあるので注意すること。
- ⑩長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じる
ので、適時交換すること。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可
能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使用を中
止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】**

(保管方法)

- ①「もらい錆」を防ぐために、錆びのある器具と一緒に
保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納
しないこと。
- ③本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保
管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】**

(洗浄、滅菌方法)

- ①汚染除去のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適した
ものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ②超音波洗浄器で洗浄する時には、器具同士が接触して
損傷することがないように注意すること。また、汚
れが落ちやすいようにバスケットなどに収納するこ
と。
- ③洗浄剤が残留しないように十分すすぎを行うこと。
- ④洗浄後は、腐食を防ぐために必ず乾燥させること。
- ⑤使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、破損等の異常が
ないことを点検すること。
- ⑥点検後、高圧蒸気滅菌をすること。滅菌のための滅菌
バック詰め等にあたっては、確実に滅菌できるように
配慮すること。
- ⑦金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面に
傷をつけるので、汚物除去及び洗浄時に使用しない
こと。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:  株式会社 **ヨシダ**
住 所: 〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電 話 番 号: 03-3845-2931
F A X 番 号: 03-3841-8204

製 造 元: オームコーポレーション社 ＊
Ormco Corporation
(国名: アメリカ合衆国)