

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード:31776000

メガミラー

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 種類

メガミラー #4 φ22
メガミラー #4W φ22
メガミラー #4 φ22 アブレーション用
メガミラー用ホルダー

2. 原材料

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いるミラーヘッド及びハンドルからなる歯科用器具。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水(超酸性水)等の機能水、家庭用洗剤は、金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。
- ②使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。*
- ③洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ④薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。特に長時間の浸漬は避けること。*
- ⑤消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。*
- ⑥洗浄、消毒、滅菌には精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で鏡面曇りや金属腐食を起こすことがある。
- ⑦加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器など)の乾燥温度に注意すること。高温での乾燥により、鏡面曇りや器質が変質または変色することがある。
- ⑧洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。EOG ガス滅菌で鏡面の曇りを起こすことがある。
- ⑨腐食(錆び)の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

⑩超音波洗浄器で洗浄すると、鏡面が剥離するので使用しないこと。

⑪器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いをしないこと。特に鏡面はガラス素材なので、強い力で圧迫すると破損するおそれがある。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ①保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後必ず乾燥させること。
- ②「もらい錆」を防ぐために、錆びのある器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。
- ③本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後には以下の点検を行うこと。

- ①鏡面にキズ、ヒビ、破損等がないこと。
 - ②歯鏡全体にキズや腐食がないこと。
 - ③鏡枠の中で鏡面が動かないこと。
 - ④接合部に錆びや剥離等がないこと。
- 上記の様な異常が見られた場合は、使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:  株式会社 **ヨシダ**
住 所: 〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号: 03-3845-2931

F A X 番 号: 03-3841-8204

製 造 元: エー・ハーネンクラット

E. HAHNENKRATT GmbH (国名: ドイツ)