

デンタフィット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品は天然ゴムを素材にした製品である。
天然ゴムはまれにアレルギー症状を起こすことがあるので、天然ゴムによるアレルギー症状の既往歴のある患者を治療する際、もしくは当該既往歴のある医療従事者は使用しないこと。（「使用上の注意」の項参照）
- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】**

形 状：前指タイプ

表面仕上げ：表面仕上げT、パウダーなし

主 材 料：天然ゴムラテックス

サイズ	幅 mm	全長 mm
5 ¹ / ₂	66-78	230 以上
6	71-83	
6 ¹ / ₂	77-89	
7	83-95	
7 ¹ / ₂	89-101	
8	96-108	
8 ¹ / ₂	102-114	

※JIS T 9113 に適合



【使用目的又は効果】*

歯科の診察、治療及び処置に用いる（手術を除く）。

【使用方法等】

手指を洗浄し、手指で手袋の表面をさわらないように装着した後、歯科診療を行う。

【使用上の注意】*

1. 使用注意

- ①本品は、天然ゴムを素材にした製品である。天然ゴムはまれにかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状を起こすことがある。このような症状の既往歴のある患者を治療する際、もしくは当該既往歴のある医療従事者は使用しないこと。また、このような症状を起こした場合は直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- ②天然ゴムと接触する機会の多い人は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に際して注意すること。

2. 重要な基本的注意

- ①本品は薬品（モノマー、溶剤、油脂等）によって膨張したり、薬品が浸透したりする場合があるので、使用に際して注意すること。
- ②シリコーン系印象材の中には、ラテックス手袋により硬化が妨げられるものがあるので、使用前に正常に硬化することを確認すること。
- ③製品に破損、ピンホール等の異常が認められた場合は使用しないこと。
- ④廃棄に関する注意：使用後は感染防止に配慮し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】*

（保管方法）

水ぬれに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。

（有効期間）

外箱に記載されている有効期限までに使用すること。
（有効期限は自己認証〔当社データ〕による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **アンスル**

住 所：〒110-8507

東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番号：03-3841-8204

製 造 元：アンセル社（国名：マレーシア）

Ansell N.P. SDN. BHD.