

歯科材料 6 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDNコード 70891000

ラボパテ

【禁忌・禁止】

本品または本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】＊

1. 形状、原材料

構成品	性 状	成 分
ベース材	淡赤色のパテ状	ポリシロキサン、二酸化ケイ素 他
促進材	青色のペースト状	ケイ酸アルキル、ジアルキルスズジカルボキシレート 他

付属品：計量スプーン

2. 仕様

(室温 23℃、相対湿度 50℃の場合)

練和時間 : 30～45秒

作業時間 : 約90秒

硬化時間 : 5～7分



ショアA硬さ : 63～70

【使用目的又は効果】

複模型の作製に用いるシリコン印象材。

【使用方法等】

- ① 付属の計量スプーンでベース材を計量する。
- ② ベース材を手のひらに伸ばし、中央部分に計量スプーンの縁を押し付け円形の印を付ける。(計量スプーン一杯のベース材に対し、印は1個)
- ③ 円形の直径と同じ長さの促進材を注出する。
チューブのふたは使用後すぐに閉めること。

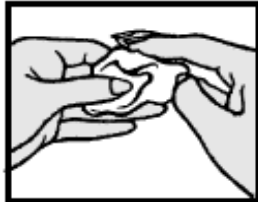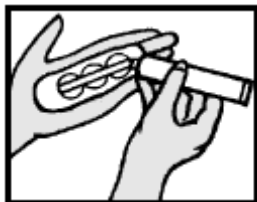

- ④ 均一な色になるまで 30-45 秒間練和する。
- ⑤ 室温では 5-7 分で硬化する。高温又は促進材の量が多めの場合には硬化時間は早まり、低温又は促進材の量が少なめの場合には硬化時間は遅くなる。

【使用上の注意】＊

1. 使用注意

- ① 口腔内で使用しないこと。
- ② 開封後はできるだけ速やかに使用すること。

2. 重要な基本的注意

- ① 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
- ② 本品又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ① 本品は、25℃以下の常温で乾燥した暗所に保管すること。
- ② 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

(有効期間)＊

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
(使用期限は自己認証[当社データ]による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシタ**

住 所：〒110-8507

東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番号：03-3841-8204

製 造 元： コルテーン／ウェルデント社
Coltene/Whaledent AG
(国名：スイス)