

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成へら JMDN コード 38530000

コルテン スパチュラ

【形状・構造及び原理等】*

1. 外観



2. 寸法

全長：234mm

幅：30mm

3. 原材料

ステンレス鋼（把持部は木製）

【使用目的又は効果】

印象材を練和するために用いる器具。

【使用方法等】

練和紙等に分取した印象材を練和する。

【使用上の注意】**

- ①洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- ②次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭用洗剤は、金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。
- ③破損、曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ④長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）*

- ①保存期間の長短に関わらず、腐食を防ぐために洗浄後乾燥すること。
- ②「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に保管、収納しないこと。

【保守・点検に係る事項】*

（洗浄方法）

- ①洗浄のために用いる洗浄剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ②洗浄剤の残留がないように十分すすぎをすること。
- ③超音波洗浄器で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。また汚れが落ちやすいようにバスケットなどに収納すること。
- ④洗浄後は、腐食を防ぐために必ず乾燥させること。*
- ⑤清掃、洗浄に金属たわし、クレンザー（磨き粉）等を使用すると器具の表面を損傷させるので注意すること。

（点検）

- ①使用前に曲がり、変形等の有無を確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨネタ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元： コルテン／ウェルデント社
Coltene/Whaledent AG
（国名：スイス）