

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー JMDN : 16670000

ブラッセラー・LVS

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 種類 *
834/314/021、834/314/016、6844/314/016、6844/314/014
852EF/314/014、955EF/314/008、379EF/314/023
- 原材料
軸 部：ステンレス鋼
作業部：ダイヤモンド砥粒

【使用目的又は効果】

微細なダイヤモンド結晶で砥着されたステンレス製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、歯や歯科補綴物等を研削するために用いる回転式の研削器具。

【使用方法等】

- 操作方法
タービンハンドピースに装着して使用する。
- 使用方法に関連する使用上の注意
 - 記載されている回転数以下で使用する。
 - ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャックを確実に奥まで挿入して、半チェックでないことを確認すること。
 - あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
 - 頭部の細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
 - 歯髄為害防止のため、十分な量（少なくとも 50ml/min）の注水下で使用する。

【使用上の注意】**

- 使用注意
 - 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
 - 目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
 - 次の回転数を超えて使用しないこと。
LVS-1、LVS-2 : 160,000r.p.m./min
LVS-3、LVS-4、LVS-7、LVS-8 : 300,000r.p.m./min
LVS-6 : 450,000r.p.m./min
 - 破折、曲がり等の原因になるので、2 N を超える負荷を掛けないこと。
 - 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬剤等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。
- **
 - 長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により、感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

- (保管方法)
- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
 - 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- (洗浄方法)
- 本品を金属製のインスツルメント収納ケースに入れて、超音波洗浄剤もしくは超音波洗浄に使える小器具洗浄剤を金属製のインスツルメント収納ケースに入れ、超音波洗浄すること。
 - 本品がすべて洗浄液に浸かるように十分な量の洗浄液を入れること。
 - 消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。*
 - 超音波洗浄時間は 30 分程度行うこと。
 - 洗浄後は洗浄剤が残留しないように十分すすぎを行うこと。仕上げすすぎには、精製水を用いることを推奨する。

(滅菌方法)

- 洗浄後は腐食を防ぐために必ず乾燥させること。
- 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、破損等の異常がないことを点検すること。
- 点検後、高圧蒸気滅菌を行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：Gebr. Brasseler GmbH&Co.KG
(国名：ドイツ)