

機械器具（25）医療用鏡
 一般医療機器 双眼ルーペ JMDN コード 32692000

セイラー ルーペ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



		作業距離 (mm)		
		Short 340	Regular 420	Long 500
倍 率	2.5 X	S × 2.5	R × 2.5	L × 2.5
	3.0 X	S × 3.0	R × 3.0	L × 3.0
	3.5 X	S × 3.5	R × 3.5	L × 3.5

2. 原材料

拡大鏡：ガラス、プラスチック樹脂
 ゴーグル：プラスチック樹脂

【使用目的又は効果】

外科処置時に術者が装着する眼鏡に取り付けられたレンズから成るシステム。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。観察野に直接光を供給する外部光源と接続することもできる。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書等を参照すること。以下に概要を示す。

1. 使用方法

- ① 拡大鏡部が 30～45 度下へ向くようにヒンジを調節する。
- ② ルーペを装着し、ヘッドストラップをかける。
- ③ 眼幅調節ネジを回して、視野が明瞭な一つの円形になるように眼幅を調整する。
- ④ 焦点の合う距離を確認する。

【使用上の注意】＊

詳細は取扱説明書等を参照すること。

- ① 使用者の視力等により焦点が異なることがあります。
- ② 必ずヘッドストラップを使用すること。
- ③ 水や洗浄液、滅菌液等へ浸漬しないこと。
- ④ レンズに直接クリーナーを吹き付けないこと。
- ⑤ 本品は耐熱性ではありません。滅菌等で加熱しないこと。
- ⑥ グルタルアルデヒドを含む製品を使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

詳細は取扱説明書等を参照すること。

- ① レンズ部はレンズクリーナーや 70%イソプロパノールで湿らせたやわらかい布で清掃すること。
- ② 清掃の際に本体に過剰の液体がかからないようにすること。
- ③ レンズクリーナーか 70%イソプロパノール以外は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨネタ**
 住 所：〒110-8507
 東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
 器材部
 電 話 番 号：03-3845-2931
 F A X 番号：03-3841-8204

製 造 元：セイラー社
 Seiler Instrument & Manufacturing
 Company, Inc.
 (国名：アメリカ合衆国ミズーリ州)

取扱説明書等を必ずご参照ください。