

器具器械 58 整形用器具器械
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード 70757000

コエックス ラボアナログ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



2. 原材料

ステンレス鋼

3. 原理

本品は補綴物を作製するための作業模型上でフィクチャーの埋入状態を再現するために使用するインプラント体の複製品である。

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料。

【使用方法等】

（使用方法）

本品を専用のスキャンボディに連結・固定し、周囲に人口歯肉材を築盛、石膏を注入し、作業用模型を作製する。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- ①コエックススキャンボディ以外の技工パーツと組み合わせ使用しないこと。
- ②本品を他のパーツと連結させるときには、専用器具を使用すること。
- ③本品を他のパーツと連結させた際、嵌合状態が適切であるか確認し、異常があるときには使用しないこと。

【使用上の注意】

（使用注意）

- ①形状の異常、変形、破損、汚れ、異物の付着等がある製品を使用すると、正確な情報が取得できない可能性があるため、使用前にこれらの異常がないことを確認すること。
- ②本品に過度の力や衝撃を与えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

本品は、高温、多湿、直射日光、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシギ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

画像情報部
電 話 番 号：03-3845-2925
F A X 番 号：03-3845-2926

製造元：アルム デンティストリー＊
ARUM DENTISTRY Co., Ltd. （大韓民国）