

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN 70904000

QパウダーG

【禁忌・禁止】

- ・慢性気管支炎または喘息に起因する上気道感染症の患者には使用しないこと。
- ・本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・免疫が弱体化した患者（心内膜炎等）の深い歯周ポケットへの使用は菌血症を起こす可能性があるため、使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状＊
白色粉末状。
2. 種類
 - ・エクストラファイン
 - ・ファイン
3. 成分
グリシン、その他
4. 原理
能動型機器接続歯面清掃用器具に本製品を補充し、当該器具の先端より、本製品を歯の表面に水と共に噴出させ歯面から歯垢や着色物等を除去して清掃（研磨）する。

【使用目的又は効果】

粉末の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法
 - ①患者の唇にワセリンを塗布する。
 - ②本品を適応機種に補充し、歯面の清掃及び研磨を行う。尚、使用する際は適応機種の取扱説明書をご参照の上、その内容に従って使用すること。
 - ③使用後は手を洗う。
 - ④使用後は患者の顔を洗う。（ウェットティッシュ等）
2. 使用方法に関する使用上の注意
 - ①スプレーを一点に集中して噴射しないこと。円を描くように噴射し、均一に洗浄すること。
 - ②クラウン等の補綴物に直接噴射しないこと。

【使用上の注意】

1. 使用上の注意＊
本品は、下記の適応機種のみで使用する。（適応機種）
 - ・クイックジェットM（認証番号：21900BZX00750000）
2. 重要な基本的注意
 - ①患者及び術者は保護メガネ等、適切な保護具を着用すること。
 - ②術者は、マスクと手袋を着用すること。
 - ③本品を使用する際は、バキュームを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ①使用期限：
容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[当社データ]による。）
- ②保管条件：
温度：-10℃～25℃
相対湿度：10%～95%
熱源の近くに保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシタ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
機械部
電話番号：03-3845-2941
F A X 番号：03-3845-2948

製造元：エレクトロ メディカル システムズ社
E.M.S. Electro Medical Systems S.A.
（国名：スイス）