

歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN 34811000

ゼニスユー Model

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- 形状
うすだいたい色のゲル状
- 成分
ウレタン ジメタクリレート、その他
- 原理
特定の波長の光が一定量照射されると含まれている光重合開始剤によってラジカルを生成する。生成されたラジカルがモノマーやオリゴマーと連続的に反応し、3 次元的にポリマーを形成、増大することで固体化（硬化）する。

【使用目的又は効果】

歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる。

【使用方法等】

- 使用方法
 - ① 本品を上下に十分に振った後、3 D プリンターのレジンタンクに注ぎ入れる。
 - ② 3 D プリンターの取扱説明書に従い、造形物の出力を行う。
 - ③ 出力物を 3 D プリンターより取り出し、洗浄を行う。
 - ④ 洗浄後、造形物の支持台を除去し追加硬化させる。
- 使用方法に関する使用上の注意
本品は環境光（日光や蛍光灯）の影響を受けるので、使用後は直ちにボトルのキャップを閉めること。また、取り出した材料は直ぐに使用すること。

【使用上の注意】

- 使用上の注意
 - ① 本品は換気の良い又は換気設備を備えた場所で、常温で使用する。
 - ② 本品の使用時には保護メガネ、手袋等、適切な保護具を着用すること。
 - ③ 本品は使用期限内であっても開封後は約 6 ヶ月以内に使用すること。

2. 重要な基本的注意

- ① 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、本品の使用により過敏症状を起した場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
- ② 本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ③ 本品は皮膚に付着しないように注意すること。万が一皮膚に付着した場合には、直ちに多量の流水と石鹸で洗浄し、専門医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

10℃～30℃の換気が良い暗所。

（有効期間）

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

画像情報部

電話番号：03-3845-2925

F A X 番号：03-3845-2926

製造元：デンティス社

Dentis Co.Ltd. （韓国）