


機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN 35761000

ゼニス キュア


【形状、構造及び原理等】

1. 外観及び構造

1) 本体

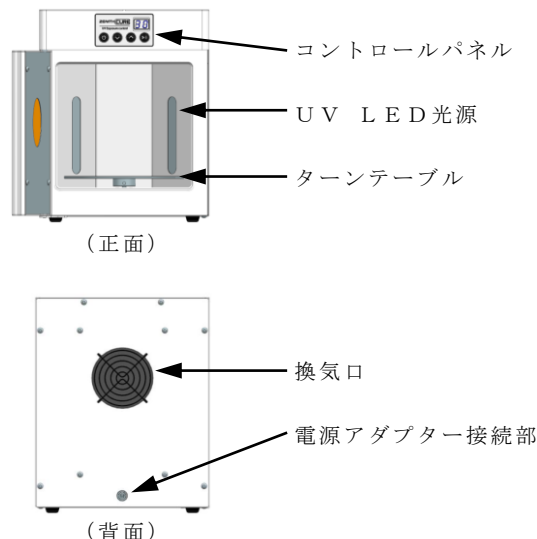

2) コントロールパネル

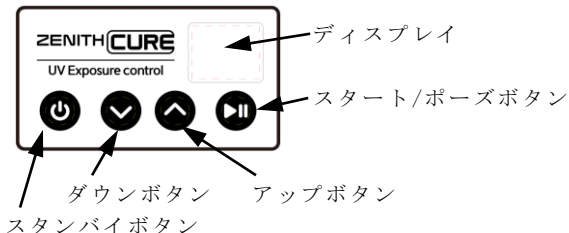

2. 寸法及び電氣的定格

寸法：225 mm × 247 mm × 275 mm

重量：7 kg

定格電圧：AC 100V - 240V

周波数：50 - 60 Hz

3. 作動原理

UV LED 光源から照射されるレーザー光はリフレクターを通して全反射され、ターンテーブル上に置いた 3D プリンターの造形物を硬化させる。

【使用目的又は効果】

歯科技工室で、高分子材料を光重合するために用いる。

【使用方法等】

- ① 電源アダプターを本体と商用電源コンセントに接続する。
- ② 本体のドアを開き、3D プリンターの造形物を本品の内側に接触しない様にターンテーブルの中央に置き、ドアを閉める。

- ③ スタンバイボタンを 2 秒以上押し電源を入れる。
- ④ アップボタン、ダウンボタンを押し、照射時間を設定する。（推奨最大時間：30 分）
- ⑤ スタート/ポーズボタンを押し、照射を行う。
- ⑥ 完了後、UV LED が消灯していることを確認し、造形物を取り出す。

【使用上の注意】

- ① 眼の損傷を引き起こす可能性があるため、必要以上に UV LED を見ないこと。
- ② 使用後は高温になるため、火傷に注意すること。
- ③ 造形物及び本品が損傷する可能性があるため、推奨最大時間を超過した照射は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

（耐用期間）

耐用期間は 3 年（自己認証[当社データ]による。）

【保守・点検に係る事項】

使用後は、清潔な布（綿）でターンテーブルと製品の表面を清掃すること。有機溶剤や漂白剤などの洗剤は、製品の変形を引き起こす可能性があるため、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 **ヨシタ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
画像情報部
電話番号：03-3845-2925
FAX 番号：03-3845-2926

製造元：デンティス社
Dentis Co.Ltd.（韓国）

取扱説明書を必ずご参照ください