

## Lunos プロフィー パウダー

### 【禁忌・禁止】

- 慢性気管支炎または喘息に起因する上気道感染症の患者には使用しないこと。
  - 本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
  - エナメル質損傷部やエナメル形成不全部分、ホワイトスポットに使用しないこと。
- <ジェントルクリーン>\*
- 気腫等、出血の恐れがあるので軟組織、歯肉溝、歯周ポケットに向けて噴射しないこと。
- <ペリオコンビ>\*
- 菌血症の原因になる恐れがあるので、以下の患者の深い歯周ポケットには使用しないこと。
    - 心内膜炎の患者 - 伝染病の患者 - 糖尿病の患者
    - 妊娠・授乳中の患者 - 免疫不全症の患者
    - 放射線又は化学療法治療中、抗生物質投与中の患者

### 【形状・構造及び原理等】

- 形状  
粉末状
- 種類\*
  - ジェントルクリーン  
(ナチュラル、オレンジ、スペアミント、ワイルドベリー)
  - ペリオコンビ
- 成分\*  
トレハロース、香料、その他  
(ただし、ジェントルクリーンナチュラルおよびペリオコンビは香料を含まない。)
- 原理  
能動型機器接続歯面清掃用器具に本製品を充填し、当該器具の先端より、本製品を歯の表面に噴出させ歯面から歯垢や着色物等を除去して清掃（研磨）する。

### 【使用目的又は効果】

粉末の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。

### 【使用方法等】

- 使用方法
  - 使用前に本品ボトルを軽く数回振る。
  - 本品を能動型機器接続歯面清掃用器具に充填し、歯面の清掃及び研磨を行う。
  - 清掃及び研磨終了後は、水で口腔内を洗浄する。
- 使用方法に関する使用上の注意
  - 施術開始前に、患者の唇にワセリン等を塗布して保護すること。
  - 使用時は、エアロゾルの飛散を抑えるため、適切なバキュームチップを使用すること。

- ③使用後は、患者に付着および飛散した本品をウェットティッシュ等で除去すること。
- ④併用する能動型機器接続歯面清掃用器具の取扱説明書等の指示に従って使用すること。
- ⑤使用後に本品が機器に残った場合、本品をボトルに戻さずに必ず廃棄すること。
- ⑥湿気の吸湿を防ぐため、パウダー使用後はすぐに容器の蓋をしっかりと閉めること。
- ⑦処置後2～3時間以内の飲食により、歯の色素沈着を起こす可能性があるため、飲食しないよう患者に説明すること。

### 【使用上の注意】

1. 使用上の注意  
本品の使用時、術者は保護メガネ、手袋等、適切な保護具を着用すること。患者には、保護メガネ等により目の保護を行うこと。
2. 重要な基本的注意
  - ①本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には、本品を使用しない事。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
  - ②本品は飲み込まないように注意すること。誤って飲み込んだ場合は、必要に応じて、専門医の診察を受けさせること。
  - ③本品は、目に入らないように注意すること。万が一目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ①使用期限：  
容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[当社データ]による。）
- ②保管条件：  
温度：0～25℃  
湿度：10～75%  
直射日光が当たらない場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 **オロケム**  
住 所：〒110-8507  
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先  
器材部  
電話番号：03-3845-2941  
FAX番号：03-3845-2948

製造元：Orochemie GmbH + Co. KG  
(国名：ドイツ)