

歯科材料 03 義歯床材料
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN 34811000

スプリントレイ ダイ&モデル 2

【禁忌・禁止】

- ・本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある医療従事者の使用及び当該既往歴のある患者への使用はしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状
 - ・ Tan : 黄褐色の液体。
 - ・ Gray : 灰色の液体。
 - ・ Natural : 薄橙色の液状。
2. 原理
スキャンされた 3D 画像と 3D プリンターとを組み合わせ
て造形される光重合性の樹脂材料である。

【使用目的又は効果】

歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法
 - ①本品を上下に十分に振った後、3D プリンターの
レジンタンクに注ぎ入れる。
 - ②3D プリンターの取扱説明書に従い、造形物の出
力を行う。
 - ③出力物を 3D プリンターより取り出し、洗浄を行
う。
 - ④洗浄後、造形物の支持台を除去し追加硬化させ
る。
 - ⑤ブラシを使用して石鹸とぬるま湯で造形物の洗
浄を行う。

2. 使用方法に関する使用上の注意

- ①本品は環境光（日光や蛍光灯）の影響を受けるの
で、使用後は直ちにボトルのキャップを閉めるこ
と。また、取り出した材料は直ぐに使用すること。
- ②レジンタンクに残った本品は、濾過して元のボト
ルに戻すこと。
- ③使用期限が過ぎた本品は使用しないこと。光重合
開始剤が適切に作用せず、造形物の安定性が損な
われる可能性があります。

【使用上の注意】

1. 使用上の注意
 - ①本品は換気の良い又は換気設備を備えた場所で、
常温で使用する。
 - ②本品の使用時には保護メガネ、手袋等、適切な保
護具を着用すること。

2. 重要な基本的注意

- ①本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎
などの過敏症の既往歴のある医療従事者、及び当該
既往歴のある患者には、本品を使用しないこと。ま
た、本品の使用により過敏症状を起こした場合には
直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
- ②本品は、目に入らないように注意すること。万一目
に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼
科医の診察を受けること。
- ③本品は皮膚に付着しないように注意すること。万が
一皮膚に付着した場合には、直ちに多量の流水と石
鹸で洗浄し、専門医の診察を受けること。
- ④本品は呼吸器系に刺激を与えるため、本品や本品の
蒸気又は研削屑を吸い込まないようにすること。ま
た、頭痛、めまい、吐き気、呼吸困難等の重篤な症
状を伴う場合は、すぐに医師の診断を受けること。
- ⑤未重合の本品を口腔内に入れないこと。本品を飲み
込んだ場合は、多量の水または牛乳を飲ませてすぐ
に医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

15℃～25℃で直射日光を避ける。

（有効期間）

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシタ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
画像情報部
電話番号：03-3845-2925
FAX 番号：03-3845-2926

製造元：スプリントレイ
SprintRay Inc. （アメリカ合衆国）