


機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN 35761000

スプリントレイ ナノキュア

【形状、構造及び原理等】

1. 外観及び構造

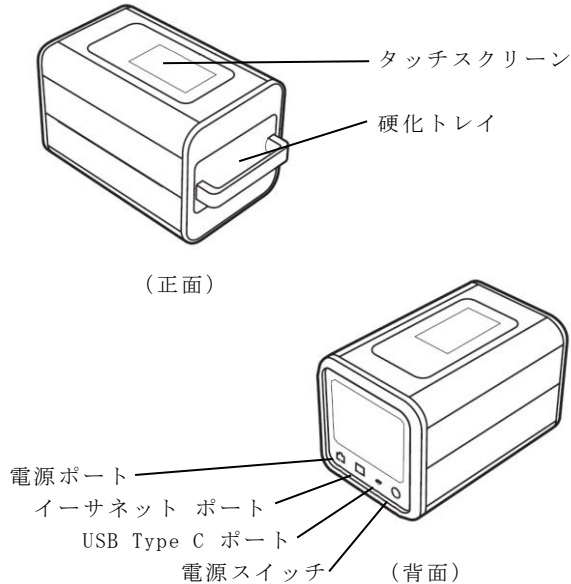

2. 寸法及び電氣的定格

寸法：200 mm×205 mm×345 mm
定格電圧：AC 100V - 240V
周波数：50 / 60 Hz

3. 作動原理

光硬化させた 3D プリンターの造形物を光により二次硬化させ、造形物の強度を高める。

【使用目的又は効果】

歯科技工室で、高分子材料を光重合するために用いる。

【使用方法等】

- ① 付属の電源ケーブルを使用して、本体とサージプロテクターまたは無停電装置に接続し、電源スイッチを入れる。
- ② ハンドルを引いて硬化トレイを引き出す。
- ③ 硬化トレイに 3D プリンターの造形物を置き、硬化トレイを押し戻す。
- ④ タッチスクリーンから対応する材料を選択し、硬化を開始する。
- ⑤ 完了後、造形物を取り出す。

【使用上の注意】

- ① 紫外線は人体に有害なため、直接、目や皮膚に照射しないこと。
- ② 使用後は高温になるため、火傷に注意すること。
- ③ 本品は直射日光を避け、水平な換気の良い場所に設置すること。
推奨動作温度：21～29℃
- ④ 本品の背面及び底面にある通気口をふさがないこと。

【保管方法及び有効期間等】

(耐用期間)

耐用期間は 3 年（自己認証[当社データ]による。）

【保守・点検に係る事項】

- ・ 本品は、定期的にソフトウェアの更新を行うこと。
- ・ 硬化トレイのガラス部に樹脂材料が付着した場合は、ガラス部をトレイから取り外し、IPA で樹脂材料を除去すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

画像情報部

電話番号：03-3845-2925

FAX 番号：03-3845-2926

製造元：浙江迅実科技有限公司

Zhejiang Xunshi Technology Co., Ltd.

(中華人民共和国)

取扱説明書を必ずご参照ください