

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 歯科用口腔内カメラ JMDN 70179000


ピクシーカム

【禁忌・禁止】

- ・照射光を直接見ないこと。[目を傷めるおそれがある]
- ・照射光を患者の目に当てないこと。[目を傷めるおそれがある]
- ・ディスプレイカバーは再使用しないこと。[交差感染防止]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観・構造

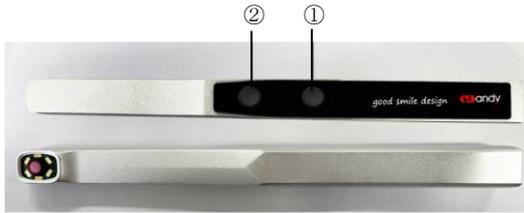

	名称
①	LED ボタン
②	キャプチャーボタン

2. 寸法及び仕様

- 寸法 : 210mm×20mm×20mm（ハンドピース）
ケーブル長 : 200 mm
重量 : 62.7g
電源・電圧 : 5V DC（USB 供給）

3. 動作環境

- 温度 : 5℃～35℃
湿度 : ≤80%
大気圧 : 86kPa～106kPa

【使用目的又は効果】

口腔内の情報をコンピューターのモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用する。

【使用方法等】

1. 準備

- 1) ハンドピースをコンピューターに接続する。
- 2) 画像情報ソフトウェアを起動する。
- 3) ハンドピースにディスプレイカバーを被せる。

2. 撮影

- 1) LED ボタンを押下し、LED を点灯させる。
- 2) 撮影部位にレンズの位置を合わせる。
- 3) キャプチャーボタンを押下し、静止画像をコンピューターに取り込む。
- 4) 画像情報ソフトウェアに取り込まれた静止画像を保存する。

3. 撮影終了

- 1) LED ボタンを押下し、LED を消灯させる。
- 2) ディスプレイカバーを剥がして廃棄する。

【使用上の注意】

- ①本品を使用する際は、他の USB 機器を使用しないこと。
- ②本品を分解したり、直接液体に浸したりしないこと。
- ③本品の照射光は非常に明るく目をくらませる可能性があるため、直接目に照射光を入れないこと。
- ④本品を落下させないように、使用しない時はハンドピースをホルダーに収納しておくこと。
- ⑤交差感染を防ぐために、必ずディスプレイカバーを使用すること。また、ディスプレイカバーは再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管環境

- 温度 : -20℃～55℃
湿度 : 10%～90%
大気圧 : 86kPa～106kPa

2. 耐用期間

耐用期間は5年（自己認証[当社データ]による。）

【保守・点検に係る事項】

- ①本品を高圧蒸気滅菌しないこと。
- ②本品の外側は、少量のアルコールを含ませた柔らかい布で定期的に清掃すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシダ**

住所：〒110-8507

東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

画像情報部

電話番号：03-3845-2925

FAX番号：03-3845-2926

製造元：上海ハンディメディカル エクイップメント
Shanghai Handy Medical Equipment Co., Ltd.
（中華人民共和国）

取扱説明書を必ずご参照ください