

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN 70904000

プロフィーペースト Pro タイプ : HAp

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図



＜チューブタイプ＞

2. 性状:ペースト状

3. 成分:グリセリン、リン酸二水素ナトリウム二水和物、水、 ヒドロキシアパタイト、他

4. タイプ

タイプ	研磨効率(RDA)	粒度(μm)
HAp	197-50	100-7

【使用目的又は効果】

ペースト状の半固形状の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 本製品を用途により使用する分だけ容器に取り出す。
2. 予防治療ブラシ、歯磨カップ等に少量ずつ付け、歯科用駆動装置及びハンドピース等を用いて低速回転にて使用する。

【使用上の注意】

1. 本製品は研磨材なので使い過ぎに注意すること。
2. 本製品を使用する際、飛び散るおそれがあるので、目の損傷を防ぐ為に保護眼鏡等を使用すること。
3. 本製品が万が一目に入った時は、ただちに大量の流水で洗い流した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

- ・常温常湿(15℃～25℃)で保管すること。
- ・直射日光が当たる場所には保管しないこと。

2.有効期間

- ・製造の日から、3年間とする。
- ・使用期限は、容器に記載。

例) 2017-05 → 2017 年 5 月 31 日



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社吉田製作所

お問い合わせ先

TEL : 03-3631-2204(海外事業部)

FAX : 03-3635-1060(海外事業部)

外国製造業者:

スベンスカ クレムファブリーケン エービー

【Svenska Krämfabriken AB】スウェーデン

販売業者

クロスフィールド株式会社

TEL : 03-5625-3306

FAX : 03-3635-1060

文書番号 FF 添 021-095