

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 吸引チューブ JMDN 16779000

## イソドライ

### 再使用禁止

#### \*【禁忌・禁止】

1. マウスピースの再使用禁止: マウスピースは1回限りの使用とすること。
2. 改造の禁止: 形態変更や改造等はないこと。
3. 異常時の使用禁止: 本製品に劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

#### \*【形状・構造及び原理等】

外観図



マウスピースサイズ: L、M、S、小児  
MDV(オプション)、SDV(オプション)

#### 【保守・点検に係る事項】

- ・バキューム用ホース: コントロールヘッドを外し、付着物等を取り除きます。オートクレーブ可。  
バキューム用ホース内に洗浄液を流して定期的に清掃すること。
- ・コントロールヘッド: バキュームチューブ内の付着物等を取り除きます。オートクレーブ可。完全に乾いてから使用すること。
- ・滅菌方法: オートクレーブ  
(滅菌条件 例: オートクレーブ 132°C 15分)

#### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社吉田製作所 TEL : 03-3631-2204 FAX : 03-3635-1060
外国製造業者: インナーライト社 【INNERLITE, INC.】 アメリカ合衆国
販売業者 クロスフィールド株式会社 TEL : 03-5625-3306 FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 080-2

#### 【使用目的又は効果】

口腔内に装着するマウスピース(付属品)と吸引器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

#### 【使用方法等】

機器の詳細な操作方法及び使用方法は付属の取扱説明書に記載してあります。本品を使用する前に必ずお読みください。

1. ユニットにバキューム用ホースを取り付ける。
2. コントロールヘッドをバキューム用ホースに接続する。
3. マウスピースをコントロールヘッドに取り付ける。
4. コントロールヘッドのバキュームコントロール用レバーで吸引量を調節する。

#### \*【使用上の注意】

詳細については取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

#### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 常温常湿で保管すること。

耐用期間: 製造の日から、正規の保守点検を行った場合に限り5年間とする。[自己認証(当社データ)による]

取扱説明書を必ずご参照下さい。