

機械器具 36 医療用ピンセット  
一般医療機器 ピンセット JMDN 35079001

## ワムゲコツイーザー

### 再使用禁止

\*\* **【禁忌・禁止】**

**ワムゲコペーストの再使用禁止:** ワムゲコペーストは1回限りの使用とすること。

\*\* **【形状・構造及び原理等】**

外観図

<オリジナル>



<クラシック>



<エンド>



**【使用目的又は効果】**

保持する物体を開いて挟む2枚の刃を持つ器具である。

\*\* **【使用方法等】**

<オリジナル>

1. 作業部にワムゲコシリコンチップをセットする。
2. ハンドルを手で握り、作業部を開く。
3. 手を緩めて、補綴物を把持する。  
この時調整ネジを使用することでストッパーとなり把持力を弱める事が出来る。又、ワムゲコシリコンチップをはずし作業部に粘着性のあるワムゲコペーストを付けて使用すると把持力が安定する。(ワムゲコシリコンチップを外さずワムゲコペーストをつけても使用可能)
4. 使用後は滅菌を施し保管する。  
(ワムゲコペーストは再使用禁止の為取り除く)  
滅菌条件(例):オートクレーブ 135℃ 15分(乾燥工程不可)

<クラシック><エンド>

1. ハンドルを手で握り、作業部を開く。
2. 手を緩めて、補綴物を把持する。
3. 使用後は滅菌を施し保管する。  
滅菌条件(例):オートクレーブ 135℃ 15分(乾燥工程不可)

\*\* **【使用上の注意】**

1. ステンレス鋼使用:素材のステンレス鋼は、鉄と比較して錆びにくい金属ではあるが、使用方法、環境によっては錆びることがある。以下の使用上の注意を守ること。
2. 禁忌の薬剤:次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは金属腐食を起こすおそれがあるので、使用しないこと。
3. 家庭用洗剤の使用禁止:家庭用洗剤は、金属の劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
4. 機能水の使用禁止:超酸化水(超酸性水)などは、金属を腐食させ劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。
5. 洗浄、消毒の注意:
  - ・ 使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
  - ・ 洗浄、消毒には、精製水を使用すること。
  - ・ 薬液にて消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意事項を厳守すること。
  - ・ 薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材の劣化の原因になることがある。
  - ・ 洗浄、消毒後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆や材質の劣化の原因となることがある。
6. 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止:錆や腐食の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシを使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

- ・ 水のかからない場所に保管すること。
- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。

\*\* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者及びお問い合わせ先 株式会社吉田製作所 TEL : 03-3631-2204(海外事業部) FAX : 03-3635-1060(海外事業部)
外国製造業者:ワム社 【WAM】 フランス
販売業者 クロスフィールド株式会社 TEL : 03-5625-3306 FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 082-3