


機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN 31776000

プリマミラー

【形状・構造及び原理等】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

＜外観＞

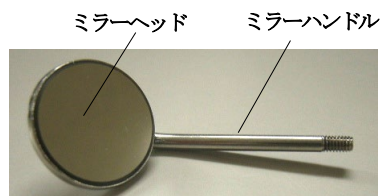

＜種類＞

5種類:サイズ2～サイズ6

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

1. 歯鏡用ハンドル(本届出対象外)にミラーハンドルのネジ部を装着する。
2. 口腔外で、ゆるみやがたつき等異常がないか確認する。
3. 患者の口腔内で診査及び圧排に用いる。
4. 使用後は滅菌を施し保管する。
滅菌条件(例):オートクレーブ 135℃ 15分

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。
3. 「もらい錆」が発生するおそれがあるため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及びお問い合わせ先 株式会社吉田製作所 TEL : 03-3631-2204(海外事業部) FAX : 03-3635-1060(海外事業部)
外国製造業者:プリマ デンタル マニュファクチャリング社 【Prima Dental Manufacturing Ltd】 イギリス
販売業者 クロスフィールド株式会社 TEL : 03-5625-3306 FAX : 03-3635-1060

文書番号 FF 添 21-070