


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN 70903000

KENDA ジルコビス

*【形状・構造及び原理等】

1. 外観図

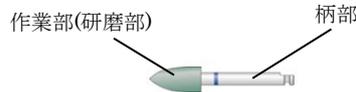

2. 種類

柄部	形状	研磨材の粗さ	ラインカラー	製品番号
RA タイプ		ミディアム	ブルー	Ref 0258
		ファイン	レッド	Ref 0268
		ミディアム	ブルー	Ref 0256
		ファイン	レッド	Ref 0266
		ミディアム	ブルー	Ref 0255
		ファイン	レッド	Ref 0265

3. 最高許容回転数: 10,000rpm

【使用目的又は効果】

本品はゴム基材で結合された研磨成分からなる歯科用研磨材で、歯科用ハンドピースに装着し、ジルコニアやアルミナクラウン等の研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 本品は滅菌されていない為、使用前に滅菌処理を行う。
2. 歯科用ハンドピースに装着してジルコニアやアルミナクラウン等の研磨を行う。
3. 使用後は滅菌を施し保管する。(ケミクレーブ滅菌は不可)
滅菌条件(例): オートクレーブ 135℃ 5分(乾燥工程不可)

*【使用上の注意】

1. 指定の回転数を超えて使用しないこと。
2. 目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
3. ハンドピースはメーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
4. あらかじめ回転させて、振れがないことを確認すること。
5. 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 2~28℃で乾燥した清潔な場所で保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及びお問い合わせ先 株式会社吉田製作所 TEL : 03-3631-2204(海外事業部) FAX : 03-3635-1060(海外事業部)
外国製造業者 : ケンダ社 【KENDA AG, Dental Manufacturing】 リヒテンシュタイン
販売業者 クロスフィールド株式会社 TEL : 03-5625-3306 FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 093-2