

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯磨カップ JMDN 16184000


プロフィーカップ Pro

再使用禁止

* **【禁忌・禁止】**
再使用の禁止

【形状・構造及び原理等】

<外観>

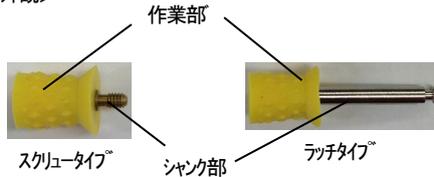

<種類>

・スクリュータイプ(690131) ・ラッチタイプ(690132)

【使用目的又は効果】

本製品は、歯科予防(清掃)時に研磨材を適用するために用いるゴム製の器具で、歯科用ハンドピースに取り付けて回転させて研磨材を歯に適用する。

【使用方法等】

1. シャック部位に応じて種類を選択し、歯科用ハンドピースに確実に取り付ける。
2. 口腔外で予備回転を行い、振れがないことを確認する。
3. 本製品に十分な研磨用ペーストを付け、歯面全体に軽く押し付けて研磨する。

*【使用上の注意】

1. 使用回転数を超えての使用は、破損やけがをするおそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
2. 使用に際しては、無理な力を加えないこと。無理な力を加えると負担がかかり、破損や口腔粘膜を傷つけるおそれがある。
3. スクリュータイプは、モーターを逆(左)回転させると外れてしまうため、使用に際しては、必ず正(右)回転で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及びお問い合わせ先

株式会社吉田製作所

TEL : 03-3631-2204(海外事業部)

FAX : 03-3635-1060(海外事業部)

外国製造業者: ダイレクタ社 【DIRECTA AB】
スウェーデン

販売業者

クロスフィールド株式会社

TEL : 03-5625-3306

FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 097-2