

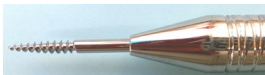
フレキシブル ペリオトーム

＊【形状・構造及び原理等】

〈外觀〉



〈種類〉

直 (S1300)	
曲 (S1300C)	
ルート エクストラクター (S1301)	

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる。

＊【使用方法等】

ルートエクストラクターについては取扱説明書をご参照ください。

1) 使用方法

1. ハンドルを手に持ち、直または曲のブレードを用いて歯根周辺の骨膜、粘膜等を剥離し切断する。
2. 歯根周辺の軟組織がある程度剥離、切断され、歯根の動揺が確認できる場合は、ルートエクストラクターを用いて根管に挿入し、抜歯を行う。
3. 使用後は滅菌を施し保管する。なお滅菌温度は 200℃を超えないものとする。

滅菌条件(例)： オートクレーブ 121℃ 20分
 ケミクレーブ 132℃ 20分

【使用上の注意】

1. 折損等の原因になるので、本品を絶対に曲げないこと。
2. 本品は錆びにくい金属ではあるが、使用方法、環境によっては錆びることがある。以下の使用上の注意を守ること。
3. 禁忌の薬剤：次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。また漂白剤は使用しないこと。
4. 家庭用洗剤の使用禁止：家庭用洗剤は、金属の劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。

5. 機能水の使用禁止: 超酸化水(超酸化性水)などは、金属を腐食させ劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。
6. 洗浄、消毒の注意:
 - ・使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗浄、消毒には、精製水を使用すること。
 - ・薬液にて消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意事項を厳守すること。薬剤の種類によっては、金属または樹脂素材の劣化の原因になることがある。
 - ・洗浄、消毒後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆や材質の劣化の原因となることがある。
7. 磨き粉、金属ウール・金ブラシの使用禁止: 錆や腐食の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
8. 取扱いについて: 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
9. 初期不良を除き、ブレードの破損や折れは保障の対象外とする。
10. 本品に汚れ、変形、キズ、その他の機能低下、異常がある場合は、適時新しい商品と交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及びお問い合わせ先 株式会社吉田製作所 TEL : 03-3631-2204 (海外事業部) FAX : 03-3635-1060 (海外事業部)
外国製造業者: ドゥウェル デンタル社 【DOWELL DENTAL PRODUCTS,INC】アメリカ
販売業者 クロスフィールド株式会社 TEL : 03-5625-3306 FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 096-2