

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN 70907000

ポリシェット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用の禁止

【形状・構造及び原理等】

柄部	形状	用途	カラー
RA タイプ		リムーバー	グリーン
		スムーサー	レッド
		シャイナー	バイオレット
		リムーバー	グリーン
		スムーサー	レッド
		シャイナー	バイオレット

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社吉田製作所
TEL：03-3631-2204（海外事業部）
FAX：03-3635-1060（海外事業部）

外国製造業者：ケンダ社【KENDA AG, Dental Manufacturing】
リヒテンシュタイン

販売業者
クロスフィールド株式会社
TEL：03-5625-3306
FAX：03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 106-1

最高許容回転数：5,000 RPM

最大圧力：1 N

【使用目的又は効果】

歯科用ハンドピースに装着し、コンポジットレジンやハイブリッドセラミックの補綴物の研磨に用いる。

【使用方法等】

本製品の用途に応じて、歯科用ハンドピースに装着し、過熱を防ぐため冷却水を注水しながら、コンポジットレジンやハイブリッドセラミックの補綴物の研磨を行う。

【使用上の注意】

- 再使用禁止。
- ハンドピースに装着の際は、シャンクを確実に奥まで挿入し、あらかじめ回転させ、半チャックや振れがないことを確認すること。
- 劣化や異常（錆、曲がり、損傷、汚染等）が見られた場合は、使用を中止すること。
- 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 2～28℃の乾燥した清潔な場所で保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、イオウ分等を含んだ空気などの悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。

<有効期間>

製造の日より4年間とする。