


機械器具 42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 JMDN 70683000

ワム X 金属コア除去イントロキット

【形状・構造及び原理等】

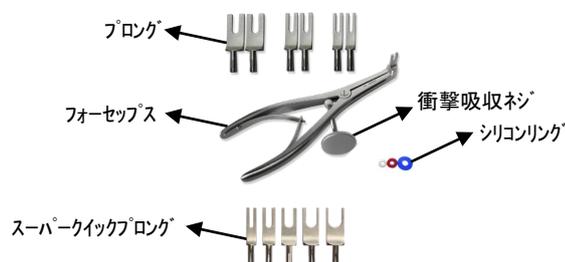

【使用目的又は効果】

本製品は口腔内の補綴物や異物等の除去に用いる器具。

【使用方法等】

＜使用前＞

1. 本製品は未滅菌であり、洗浄及び滅菌してから使用する。
2. 処置前に、診断模型、レントゲン画像などで歯牙と金属コアの位置を確認する。

＜使用方法＞

1. 金属コアと歯牙にブロングが入るスペースを切削する。
2. 切削した形状に適したブロングを選択し、フォーセップス先端部に確実に装着する。
3. 金属コアの上を指で押さえながら切削箇所へブロングを差込む。
4. 金属コアの上を指で押さえながら、フォーセップスを握り、先端部を徐々に開いて金属コアを除去する。



5. ブロングをフォーセップスから外し、洗浄して滅菌する。
(滅菌方法:オートクレーブ 例:134℃ 18分)

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 誤飲誤嚥防止の為、ラバーダム等を装着すること。
2. フォーセップスにブロングを確実に挿入していることを確認し、口腔外で開閉動作を行い、外れないことを確認すること。

＜その他の注意＞

1. 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。また、漂白剤は使用しないこと。
2. 洗浄、消毒の注意:
 - ・使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
 - ・使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品が乾燥しないように、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗浄、消毒には、精製水を使用すること。
 - ・ブラシはナイロンブラシを使用すること。
 - ・超酸化水(超酸性水)などは、金属を腐食させ劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。
 - ・アルデヒドを含む薬液はタンパク質の付着に影響があるため、使用しないこと。
 - ・家庭用洗剤は、金属の劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
 - ・アンモニアや塩化物、酸などが含まれている洗浄液は滅菌トレーや金属の腐食の原因となるので使用しないこと。
 - ・洗浄、消毒後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆や材質の劣化の原因となることがある。
 - ・磨き粉、金属ウール・金ブラシの使用禁止: 錆や腐食の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及びお問い合わせ先
株式会社吉田製作所
お問い合わせ先
TEL : 03-3631-2204(海外事業部)
FAX : 03-3635-1060(海外事業部)

外国製造業者:ワム社 【WAM】フランス

販売業者
クロスフィールド株式会社
TEL : 03-5625-3306
FAX : 03-3635-1060