

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 歯科治療用ピンセット JMDN 31814000


2WAYツイーザー

【形状・構造及び原理等】

<外觀図>



<作業部拡大図>

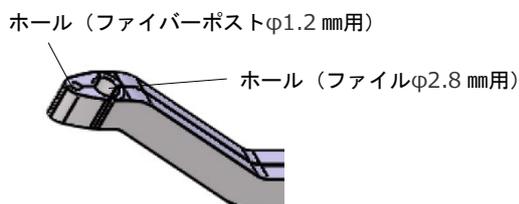

作業部: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

2つのバネ性先端部をもつ歯科用手用器具である。先端部を近接させて、口腔内に適用するファイルやファイバーポストを把持する。

【使用方法等】

1. 本品は未滅菌であり、洗浄及び滅菌してから使用する。
2. ハンドルを手で握り、作業部を開く。
3. ホールにファイル(φ2.8mm)またはファイバーポスト(φ1.2mm)を挟み、把持する。
4. 使用後は滅菌を施し保管する。
滅菌条件(例): オートクレーブ 135°C 15分

【使用上の注意】

1. 折損等の原因になるので、本品を絶対に曲げないこと。
2. 本品は錆びにくい金属ではあるが、使用方法、環境によっては錆びることがある。以下の使用上の注意を守ること。
3. 禁忌の薬剤: 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。また、漂白剤は使用しないこと。
4. 家庭用洗剤の使用禁止: 家庭用洗剤は、金属の劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
5. 機能水の使用禁止: 超酸化水(超酸性水)などは、金属を腐食させ劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。
6. 洗浄、消毒の注意:
 - ・使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗浄、消毒には、精製水を使用すること。
 - ・薬液にて消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意事項を厳守すること。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材の劣化の原因になることがある。

・洗浄、消毒後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆や材質の劣化の原因となることがある。

7. 磨き粉、金属ウール・金ブラシの使用禁止: 錆や腐食の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
8. 取扱いについて: 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
9. 初期不良を除き、作業部の破損や折れは保証の対象外とする。
10. 本品に汚れ、変形、キズ、その他の機能低下、異常がある場合は、適時新しい商品と交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

<洗浄、消毒、滅菌の注意>

1. 使用前に必ず精製水を用いて洗浄、消毒し、滅菌すること。
滅菌方法: オートクレーブ
2. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品が乾燥しないように、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
3. 薬液にて消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意事項を厳守すること。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材の劣化の原因になることがある。

<使用者による保守点検事項>

使用前・使用後の点検: 使用前・使用後は、曲がっていないか、作業部やハンドル部に破損、ヒビ、大きなキズや腐食などがいないか確認すること。これらがあつた場合は、使用せず廃棄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及びお問い合わせ先

株式会社吉田製作所

TEL : 03-3631-2204(海外事業部)

FAX : 03-3635-1060(海外事業部)

外国製造業者: コーラー社

【Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & CO.KG】ドイツ

販売業者

クロスフィールド株式会社

TEL : 03-5625-3306

FAX : 03-3635-1060

文書番号 FF 添 21-056