


機械器具 35 医療用はさみ  
一般医療機器 はさみ JMDN 35325001  
**ヒルメッド ロングシザーズ**

**【形状・構造及び原理等】**

<外観>

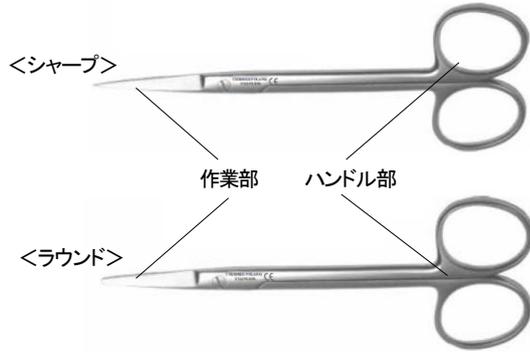

<材質>

作業部、ハンドル部: ステンレススチール

<種類>

シャープ曲、シャープ直

ラウンド曲、ラウンド直

**【使用目的又は効果】**

手術時の組織、布、縫糸等の切断に用いる。回転軸のある2枚の刃からなり、切断する材料の上で2枚の刃を閉じることによって操作する。

**\*【使用方法等】**

1. 本品は未滅菌であり、洗浄及び滅菌してから使用する。
2. 歯科手術の際に、本品を用いて縫糸や組織等を切断及び分離する。
3. 使用後は洗浄、滅菌を施し、その後乾燥させ保管する。  
滅菌条件(例): オートクレーブ 134°C 7分(乾燥工程20分)

**【使用上の注意】**

1. 折損等の原因になるので、本品を絶対に曲げないこと。
2. 禁忌の薬剤: 次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン(金属腐食を起こすおそれがあるので、使用しないこと)。
3. 家庭用洗剤の使用禁止: 家庭用洗剤は、金属の劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
4. 機能水の使用禁止: 超酸化水(超酸性水)などは、金属を腐食させ劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。
5. 洗浄、消毒の注意:
  - ・使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
  - ・把持部の付け根部分やネジ止め部分等、血液等が残留しやすい部分は丁寧に洗浄する。
  - ・洗浄、消毒には、精製水を使用し、温度は40°Cを超えないこと。
  - ・薬液にて消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意事項を厳守すること。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材の劣化の原因になることがある。推奨消毒時間: 15分以上

・超音波洗浄装置・ウォッシャー・ディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、可動部分は開放し、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。

推奨超音波洗浄条件: 温度40°C 5分

・洗浄、消毒後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。  
水分が付着したまま長時間放置すると、錆や材質の劣化の原因となることがある。

6. 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止: 錆や腐食の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金ブラシを使用しないこと。

7. 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはいししないこと。

8. 手術器具用潤滑剤の塗布を推奨する。(可動部の防錆のため)

**【保管方法及び有効期間等】**

・水のかからない場所に保管すること。

・気圧、温度(5~25°C推奨)、湿度(65%以下推奨)、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。

・「もらいさび」が発生するおそれがある為、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

**【保守・点検に係る事項】**

・初期不良を除き、不適切な使用による作業部の破損や折れは保証の対象外とする。

・使用後は感染防止に留意し、医療用廃棄物として適切に処理すること。

・使用前・使用後の点検: 使用前・使用後は、曲がっていないか、作業部やハンドル部に破損、ヒビ、大きなキズや腐食などがないか確認すること。これらがあった場合は、使用せず廃棄すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者及びお問い合わせ先

株式会社吉田製作所

TEL : 03-3631-2204(海外事業部)

FAX : 03-3635-1060(海外事業部)

外国製造業者: ヒルメッド社

【Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner】 ポーランド

販売業者

クロスフィールド株式会社

TEL : 03-5625-3306

FAX : 03-3635-1060

文書番号 FF 添 25-074