

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN 70901000

ジェットビーズ

*【形状・構造及び原理等】

形状 :粉末
成分 :ソーダ石灰ガラス
平均粒径 :105 μ m

*【使用目的又は効果】

本製品は、補綴物の研削および研磨に使用する材料です。

*【使用方法等】

研削又は研磨する装置に本材をセットし、適量を適応箇所に噴射等を行なう。詳細については、その機器の取扱説明書に従ってください。

【使用上の注意】

- ・本製品は使用目的の用途以外には使用しないでください。
- ・本製品を扱う時は、吸い込んだり、目に入ったりしないように保護マスク、保護めがねを着用してください。万一目に入った場合は、こすらないで流水でよく洗眼し、眼科医の診断を受けてください。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- ・室温で乾燥した場所、直接日光の当たらない場所に保管してください。
- ・開封後は、密封して保管してください。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 吉田製作所
TEL:03-3631-2191(代表)
FAX:03-3633-9427
お問い合わせ先
TEL:06-6783-2755(大阪工場)
FAX:06-6783-2759(大阪工場)

販売業者

株式会社 ヨシダ
住所:〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
TEL:03-3845-2931(器材部)
FAX:03-3841-8204(器材部)

文書番号 VV添17-010