

歯科材料09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN 70901000

## ペンシルジェット SS

### 【形状・構造及び原理等】

形状 : 粉末  
成分 : ソーダ石灰ガラス  
平均粒径 : 50  $\mu$ m

### 【使用目的又は効果】

本製品は、補綴物の研削および研磨に使用する材料です。

### 【使用方法等】

研削又は研磨する装置に本材をセットし、適量を適応箇所へ噴射等を行なう。  
詳細については、その機器の取扱説明書に従ってください。

### 【使用上の注意】

- ・ 本製品は使用目的の用途以外には使用しないでください。
- ・ 本製品を扱う時は、吸い込んだり、目に入ったりしないように保護マスク、保護めがねを着用してください。万一目に入った場合は、こすらないで流水でよく洗眼し、眼科医の診断を受けてください。
- ・ 装置の底等に溜まった研磨材は、廃棄してください。目詰まりや故障の原因となります。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法
  - ・ 室温で乾燥した場所、直接日光の当たらない場所に保管してください。
  - ・ 開封後は、密封して保管してください。
  - ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。

### \*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
株式会社 吉田製作所  
TEL:03-3631-2191(代表)  
FAX:03-3633-9427  
お問い合わせ先  
TEL:06-6783-2755(大阪工場)  
FAX:06-6783-2759(大阪工場)

販売業者  
株式会社 ヨシダ  
住所:〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9  
TEL:03-3845-2931(器材部)  
FAX:03-3841-8204(器材部)

文書番号 VV添17-006