

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN 70901000

ペンシルジェット SM

【形状・構造及び原理等】

形状 : 粉末
成分 : 酸化アルミニウム
平均粒径 : 80 μ m

【使用目的又は効果】

本製品は、補綴物の研削および研磨に使用する材料です。

【使用方法等】

研削又は研磨する装置に本材をセットし、適量を適応箇所に噴射等を行なう。
詳細については、その機器の取扱説明書に従ってください。

【使用上の注意】

- ・ 本製品は使用目的の用途以外には使用しないでください。
- ・ 本製品を扱う時は、吸い込んだり、目に入ったりしないように保護マスク、保護めがねを着用してください。万一目に入った場合は、こすらないで流水でよく洗眼し、眼科医の診断を受けてください。
- ・ 装置の底等に溜まった研磨材は、廃棄してください。目詰まりや故障の原因となります。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法
- ・ 室温で乾燥した場所、直接日光の当たらない場所に保管してください。
 - ・ 開封後は、密封して保管してください。
 - ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 吉田製作所
TEL: 03-3631-2191 (代表)
FAX: 03-3633-9427
お問い合わせ先
TEL: 06-6783-2755 (大阪工場)
FAX: 03-6783-2759 (大阪工場)

販売業者
株式会社 ヨシダ
住所: 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
TEL: 03-3845-2931 (器材部)
FAX: 03-3841-8204 (器材部)

文書番号 VV添17-007