

歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 JMDN 70904000

アルファアルミナ27

*【形状・構造及び原理等】

形状 :粉末
主成分 :酸化アルミニウム
粒径 :27 μm

*【使用目的又は効果】

本製品は、粉末の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いるものです。

*【使用方法等】

詳細については、医療機器(エアロステーション、ペインレスジェット)の取扱説明書の使用方法の項をご参照ください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 吉田製作所
TEL:03-3631-2191(代表)
FAX:03-3633-9427
お問い合わせ先
TEL:06-6783-2755(大阪工場)
FAX:06-6783-2759(大阪工場)

販売業者
株式会社 ヨシダ
住所:〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
TEL:03-3845-2931(器 材 部)
FAX:03-3841-8204(器 材 部)

文書番号 VV添17-003

【使用上の注意】

・本製品は、下記に示す機器の専用研磨材です。

販売名	(医療機器承認番号)
エアロステーション	(21400 BZZ 00190000)
ペインレスジェット	(21100 BZZ 00174000)

・本製品は使用目的の用途以外には使用しないでください。

・本製品を扱う時は、吸い込んだり、目に入らないように保護マスク、保護めがねを着用してください。万一目に入った場合は、こすらないで流水でよく洗眼し、眼科医の診断を受けてください。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- ・室温で乾燥した場所、直接日光の当たらない場所に保管してください。
- ・開封後はしっかりと蓋を閉め、湿気を避けて保管してください。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理してください。