


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN 70907000

ホワイトマジック

【形状・構造及び原理等】

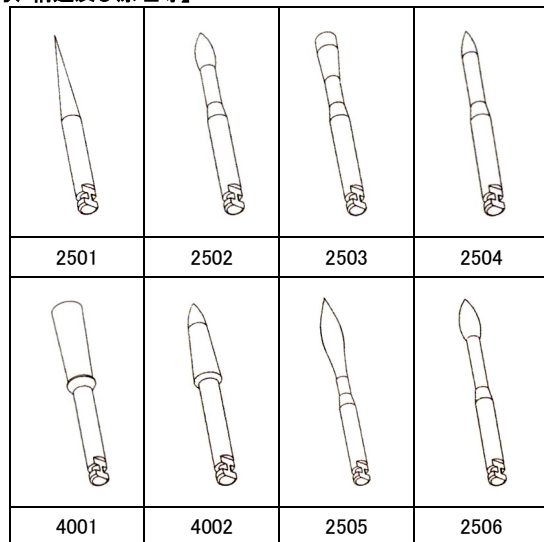

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社吉田製作所 TEL : 03-3631-2204 (海外事業部) FAX : 03-3635-1060
製造業者: アブラシブ テクノロジー社 【Abrasive Technology, Inc.】アメリカ
販売業者 クロスフィールド株式会社 住所 : 〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL : 03-5625-3306 FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 066-2

種類: 2501、2502、2503、2504、2505、2506、4001、4002、
2540(イントロキット: 2501、2502、2504、2505、2506、4002)

材質: ガラスファイバー

シャンク部径寸法: $\phi 2.33 \pm 0/-0.03\text{mm}$

【使用目的又は効果】

本品は補綴物等、または歯面の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

1. 歯科用ハンドピースに装着する。
2. 口腔外で試運転をし、異常がないかを確認する。
3. 歯科用ハンドピースの回転数を 5,000 r.p.m から 10,000 r.p.m に設定し、研磨を行う。
4. 使用後は、滅菌を施し保管する。
滅菌条件(例): オートクレーブ 135℃以下。
乾燥工程は行わないこと。

*【使用上の注意】

1. 最大許容回転数は、10,000r.p.m である。
2. 10,000r.p.m 以下の低回転で冷却水を注水しながら使用すること。
注水せずに使用する場合は、使用後、使用部位をすすぐこと。
3. 歯面に強く押しつけたりしないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 滅菌後は、滅菌バッグに入れたまま紫外線灯付きキャビネットなどに保管する。
2. 使用前・使用後の点検: 使用前・使用後は、刃部に破損、ヒビ、キズ、などがないか確認すること。これらがあつた場合は、使用せず廃棄すること。