

一般医療機器 歯科材料8 歯科用石膏及び石膏製品  
歯科用硬質石こう JMDN70897020

## たんぼぼ

### 【形状・構造及び原理等】

形状: 粉末  
成分: 石こう、着色剤、硬化時間調整剤  
色調: イエロー、グレー  
原理: 水と練和することにより水和反応を生じ、一定時間後に硬化する。

\* 仕様:

標準混水比	24%
硬化時間	10分
線硬化膨張	0.25%
圧縮強さ	44MPa

該当規格: JIS T 6600「歯科用石こう」タイプ5

### 【使用目的又は効果】

総義歯、局部義歯、クラウン、ブリッジおよび矯正用の模型製作。

### 【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 粉末100gに対して水24mlが標準ですが、水の量は操作性に支障の無い限り少量で練和した方が好結果が得られません。
- 2) 練和時間は30～60秒で均一に練和してください。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 練和の際には、水をご使用ください。
- 2) 硬化促進剤等を添加する場合には、通法に従ってご使用ください。

### 【使用上の注意】

[使用注意]

- 1) 使用する際（硬化体を研削する場合も含む）には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置や公的機関が認可した防塵マスク等を使用して、粉塵を吸入しないこと。
- 2) 硬化体を研削する際には目の損傷を防ぐため、保護めがね等の防具を使用すること。

\* [重要な基本的注意]

- 1) 本製品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 開封したまま放置すると吸湿し変質する恐れがあるので、開封後は直ちに使用すること。
- 3) 開封後に保管する場合は、十分に密封するか、密封できる容器に移すこと。
- 4) 荷崩れする恐れがあるので高く積層しないこと。

\* [使用期間]

包装に記載の使用期限は自己認証（当社データ）による。（開封後は対象外）

### 【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者 吉野石膏株式会社  
住所 〒123-0872 東京都足立区江北2丁目1番1号  
電話番号 03-3890-1101

販売元 株式会社 ヨシダ  
住所 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9  
お問い合わせ窓口  
器材営業本部  
電話番号 03-3845-2931  
FAX番号 03-3841-8204