

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (JMDN:70757000)
オクタフィックスⅡ プラスチックパターン

【禁忌・禁止】**1. 併用医療機器**

(1) 当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。[相互作用の項参照]

2. 使用方法

- (1) 記載の使用目的以外に使用しないこと。
(2) 変形や破損した製品は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[寸法] 外装及び内装に記載

[性状] 未滅菌

[材質] アクリル樹脂

[形状・構造]

BL プラスチックパターン BL プラスチックパターン ワイド

**【使用目的又は効果】**

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる、歯科技工用の器具・材料である。

【使用方法等】

模型上でワックス、パターンレジン等を併用して加工し、オクタフィックスⅡのアバットメントに装着する補綴物を作製するための鋳造型の一部品として使用する。

【使用上の注意】**重要な基本的注意**

1. マニュアルに記載された使用手順に従うこと。
2. 本製品の開封前に容器の破損、損傷のないことを確認すること。
3. 鋳造前に高温滅菌等は行わないこと。[熱により変形のおそれがある]
4. 嵌合部に異物等が無いことを確認した上で取り付けること。
5. 本品をアナログに固定する場合は、嵌合状態を確認しながら徐々に締め付けること[過度の締め付けにより嵌合部のズレや損傷が生じるおそれがある]
6. オクタフィックスⅡ専用。

相互作用(他の医薬品・医療機器との併用に関すること)

[併用禁忌・禁止](併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品。	器具の破損や術後不良が発生するおそれがあるため、指定以外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組合せが得られない。

【保管方法及び有効期間等】**貯蔵・保管方法**

1. 直射日光及び高温多湿、水濡れを避けて常温で保管すること。
2. 歯科医療従事者以外が触れないよう保管すること。
3. 適切なキャビネット内で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]	株式会社 ヨシオカ 長野県駒ヶ根市下平2934-577 TEL0265-82-5959 FAX0265-82-6353
[製造元]	株式会社 ヨシオカ
[販売元]	株式会社 ヨシオカ 長野県駒ヶ根市下平2934-577 TEL0265-98-8600 FAX0265-98-8601

使用に際しては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ず参照して下さい。