

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 (JMDN:70962001)
Anchor Lock ドリルガイド

【禁忌・禁止】**1. 併用医療機器**

(1) 当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。[相互作用の項参照]

2. 使用方法

- (1) 記載の使用目的以外に使用しないこと。
(2) 変形や破損した製品は使用しないこと。

7. 本品は歯列矯正システム Anchor Lock の専用ツールのため、他の用途では使用しないこと。

相互作用(他の医薬品・医療機器との併用に関すること)

[併用禁忌・禁止](併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品。	器具の破損や術後不良が発生するおそれがあるため、指定以外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組合せが得られない。

***【形状・構造及び原理等】**

[寸法]外装及び内装に記載


[性状]未滅菌

[材質]ステンレス鋼

[形状・構造]



ドリルガイド

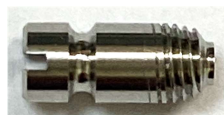

ドリルガイド(S)

【使用目的又は効果】

歯科矯正用アンカースクリューの外科用手術に用いる器具で、手術用ドリルビットで骨を穿孔する位置を決定するために用いる、手動式で再使用可能な器具である。

【使用方法等】

本品は「販売名：歯列矯正システム Anchor Lock (承認番号：30100BZX00236000)」のアンカーロックスクリューを植立する際に使用します。

- アンカーロックスクリューの植立用の誘導孔を形成する際に、アタッチメント(販売名：歯列矯正システム Anchor Lock、承認番号：30100BZX00236000)のナット部に専用ドライバー(販売名：Anchor Lock ドライバーチップ、届出番号：20B1X00007001038)を用いて本品を取り付けます。
- 本品に、誘導孔形成用の手術用ドリルビットを挿入し、植立部位に誘導孔を形成します。
- 誘導孔の形成後、本品をアタッチメントから取り外します。

【使用上の注意】**重要な基本的注意**

- 本品は未滅菌製品のため、使用前にオートクレーブで必ず滅菌を行うこと。滅菌条件 121℃ 20 分
- 洗浄、滅菌の際はなるべく精製水を使用すること。[水道水を使用すると塩素の影響で腐食するおそれがある]
- 滅菌後は汚染に注意し、手指や未滅菌の器具等で直接触れないこと。
- アタッチメントとの嵌合状況使用前に必ず確認すること。
- 誤飲等には十分注意すること。
- 洗浄不良や不適切な保管方法により、ステンレス鋼にも錆が発生する場合があるので、適切なメンテナンスを実施すること。

使用に際しては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ず参照して下さい。

【保管方法及び有効期間等】**貯蔵・保管方法**

- 未開封の状態で保管すること。
- 直射日光及び高温多湿、水濡れを避けて常温で保管すること。
- 歯科医療従事者以外が触れないよう保管すること。
- 適切なキャビネット内で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]	株式会社 ヨシオカ 長野県駒ヶ根市下平2934-577 TEL0265-82-5959 FAX0265-82-6353
[製造元]	株式会社 ヨシオカ
[販売元]	株式会社 ヨシオカ 長野県駒ヶ根市下平2934-577 TEL0265-98-8600 FAX0265-98-8601