

一般医療機器

歯科材料8 歯科用石膏及び石膏製品  
歯科用硬質石こう

JMDN70897020

## アップルストーン

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

形状: 粉末

成分: 石こう、着色剤、その他

色調: ホワイト、イエロー、ブルー、ブラウン、グリーン、ピンク、ニューグリーン、グレー

原理: 水と練和することにより水和反応を生じ、一定時間後に硬化する。

仕様:

|       |       |
|-------|-------|
| 標準混水比 | 24%   |
| 硬化時間  | 11分   |
| 線硬化膨張 | 0.20% |
| 圧縮強さ  | 49MPa |

\* 該当規格: JIS T 6600「歯科用石こう」タイプ5

### 【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる。

### 【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 粉末100gに対して24mlの水(標準混水量)を計量してください。操作性に支障の無い限り、少ない水量で練和すると、強度が高く表面の滑らかな模型が得られます。
- 2) 計量した水を容器に入れ、計量した粉末を静かに散布投入してください。一度に投入すると気泡を抱き込むので、徐々に均一に投入してください。
- 3) 手練和は、10～20秒静置したのちスパチュラ等で30～60秒間、むらなく均一に行ってください。真空練和(減圧練和)は、水と粉末をよく馴染ませてから30～60秒間、機械練和を行ってください。なお、本製品の練和には、真空練和を推奨します。
- 4) 練和した石こうを、採得した印象・型枠等に注入してください。注入する際にバイブレーターを使用すると、気泡の少ない模型が得られます。
- 5) 印象等からの脱型は約1時間後が適切です。

### 【使用上の注意】

[使用注意]

- 1) 使用する際(硬化体を研削する場合も含む)には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置や公的機関が認可した防塵マスク等を使用して、粉塵を吸入しないこと。
- 2) 硬化体を研削する際には目の損傷を防ぐため、保護メガネ等の防具を使用すること。

\* [重要な基本的注意]

- 1) 本製品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 開封したまま放置すると吸湿し変質する恐れがあるので、開封後は直ちに使用すること。
- 3) 開封後に保管する場合は、充分に密封するか、密封できる容器に移すこと。
- 4) 荷崩れする恐れがあるので高く積層しないこと。

[使用期間]

包装に記載の使用期限は自己認証(当社データ)による。(開封後は対象外)

### 【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者 吉野石膏販売株式会社  
\* 住所 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1丁目8番3号 桜ビル  
電話番号 03-3944-6571

販売業者 株式会社イシハラ  
\* 住所 〒230-0031 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目4番6号 K S みらいビル  
電話番号 045-501-8341