

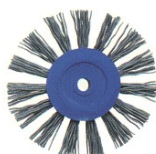
歯科材料 09 歯科用研削材料  
 一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000  
**エム・ワイ ダイヤブラシ**

**【形状・構造及び原理等】**

二列



一列

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者名：株式会社ヨシオカ  
 住所：〒131-0034  
 東京都墨田区堤通1-7-13  
 電話番号：03(3614)1917  
 ファックス：03(3614)1918  
 製造業者名：株式会社ヨシオカ

型番	二列			一列	
	レギュラー	ツインズ	ソフト	レギュラー	ソフト
粗さ	#320	#320 #500	#500	#320	#500
径(φ)	68 mm	68 mm	68 mm	56 mm	56 mm

&lt;ハンドピース用&gt;



公差：±10 mm

材料：研磨材（シリコンカーバイド）、ナイロン、プラスチック

原理：器材（レーズ）で回転させ補綴物等と接触させることで補綴物等を研削する。

**【使用目的又は効果】**

補綴物等の研削に用いる器材で、主として歯科技工用の補綴物の中間研削研磨に用いる。

**【使用方法等】**

術者はハンドピース又はレーズに装着した後、補綴物等の研削を行う。

**【使用上の注意】**

1. 本材は長時間連続で使用すると過熱を帯びることがあるので、断続的に使用する様に注意すること。
2. 無理な角度、過度の加圧での使用は破損、破折を招くので避けること。
3. 研磨物等の微粉が、目、口等に入らない様に保護メガネ、マスク等を着用の上、作業を行うこと。万一、研磨物等の微粉が目等に入った場合は、直ちに作業を中止し、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること

**【保守・点検に係わる事項】**

使用前に予備回転を行い、振れが無いことを確認すること。